

12 Aprile, 2023

# Mind Express 5

Laboratorio 2




Laboratorio Mind Express: costruiamo una attività didattica.

Questo è un incontro di tipo laboratoriale. I partecipanti dovranno avere il software Mind Express installato nel proprio dispositivo e costruire, con la guida del docente, semplici attività didattiche scegliendo alcuni modelli disponibili nel software.




# Avviare Mind Express

Accedere al profilo utente creato precedentemente

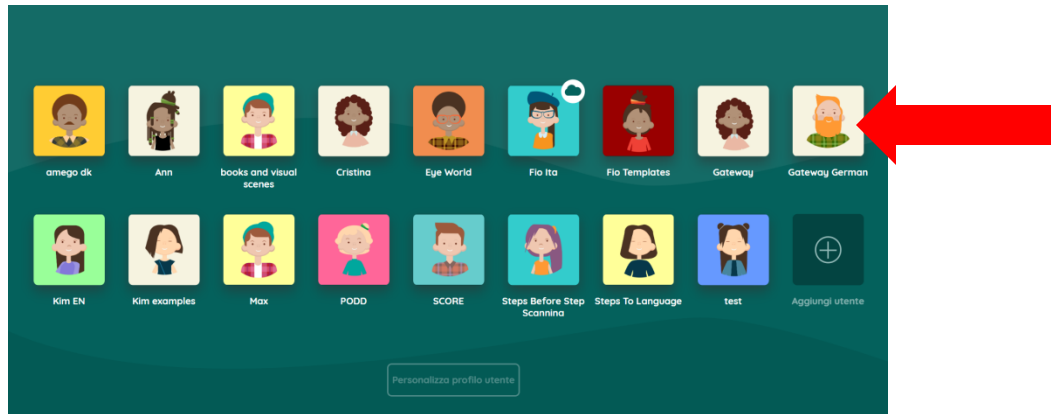

Entrati nel proprio profilo, selezionare Menu > Importa

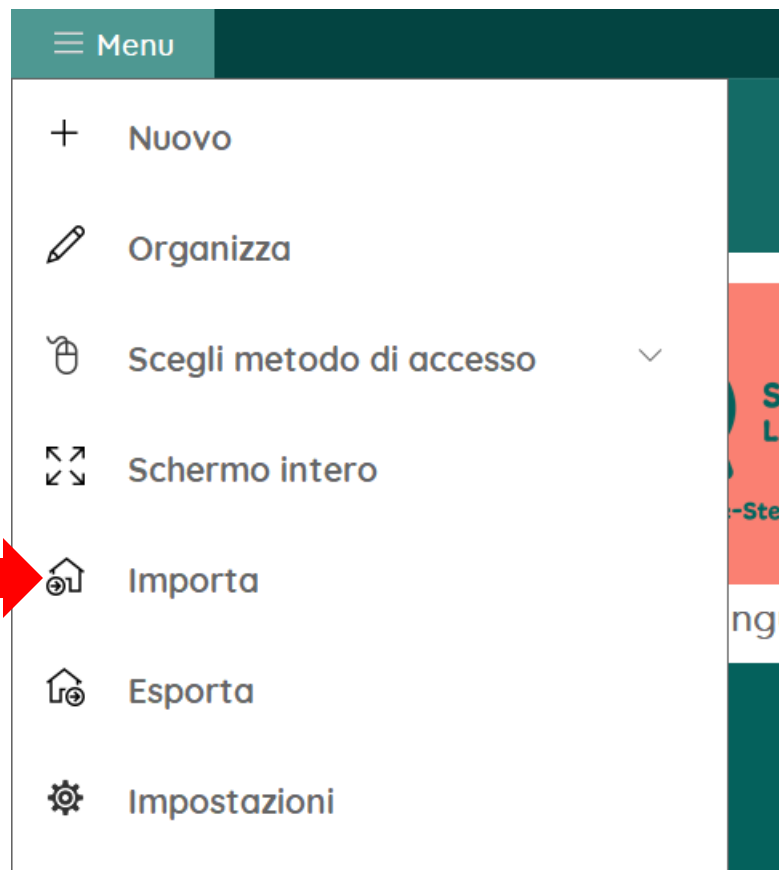

# Scegliere il comando Set di pagine online e importare il set di pagine 'Associa Parole a Immagini – Modello'

Scegli da dove importare



**Set di pagine online**

Set di pagine di base dal sito Mind Express.




**Importa da disco**

Scegli questa azione per importare un file da Mind Express 3, 4 o 5, Boardmaker 5 o 6, oppure Grid 2.



**Importa da un altro utente**

In questo set di pagine l'alunno associa quattro parole a quattro immagini corrispondenti.

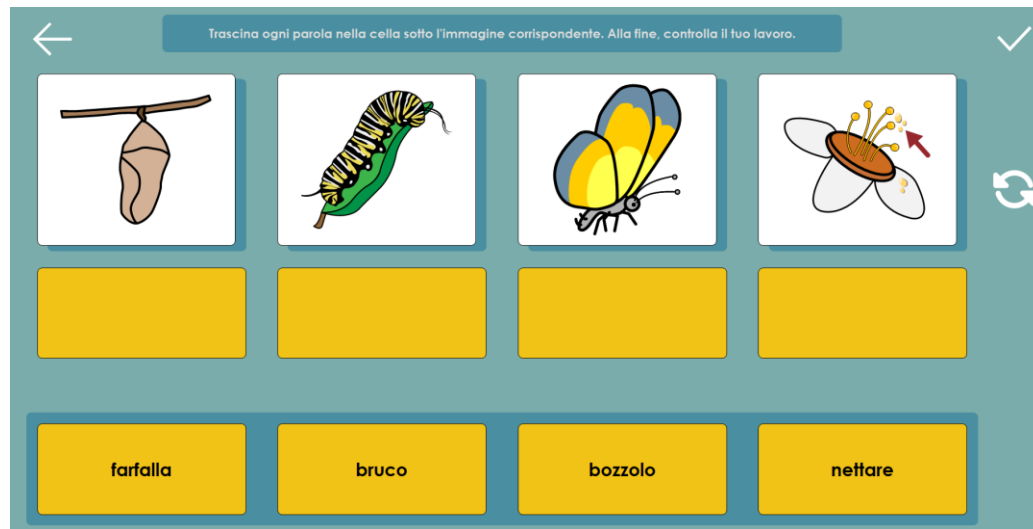

Selezionare la cella in alto a destra per posizionarsi sulla pagina nella quale inserire i propri contenuti.

Seguire le istruzioni scritte nella cella in basso.

**Attenzione:** per modificare i contenuti bisogna passare in **Modalità modifica**

Menu

Associa Parole a Immagini Modello - imposta

Aggiungi immagine

Aggiungi etichetta e messaggio

parola

parola


parola

parola

Andare in modalità modifica (Menu > Modifica)  
Aggiungere un'immagine nelle celle della colonna a sinistra  
Aggiungere una parola nei campi etichetta e messaggio delle celle nella colonna a destra.  
Salvare le modifiche (Menu > Salva come)  
Uscire dalla modalità modifica (Menu > Modifica completata)  
Premere la freccia in basso a destra per avviare l'attività.




Finita la costruzione del set di pagine, costruire una risorsa diversa.

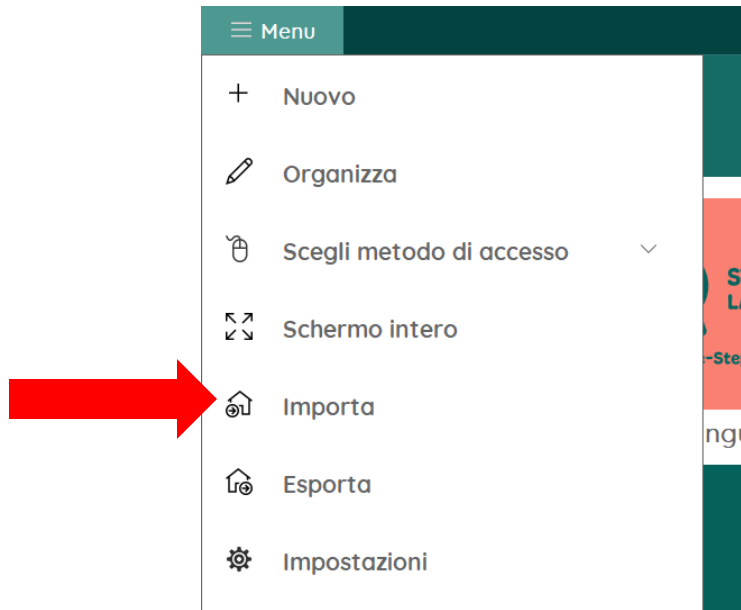

Tornare all'area utente.  
Selezionare Menu > Importa

Scegliere il comando Set di pagine online e importare il set di pagine 'Associa Definizioni a Parole - Modello'

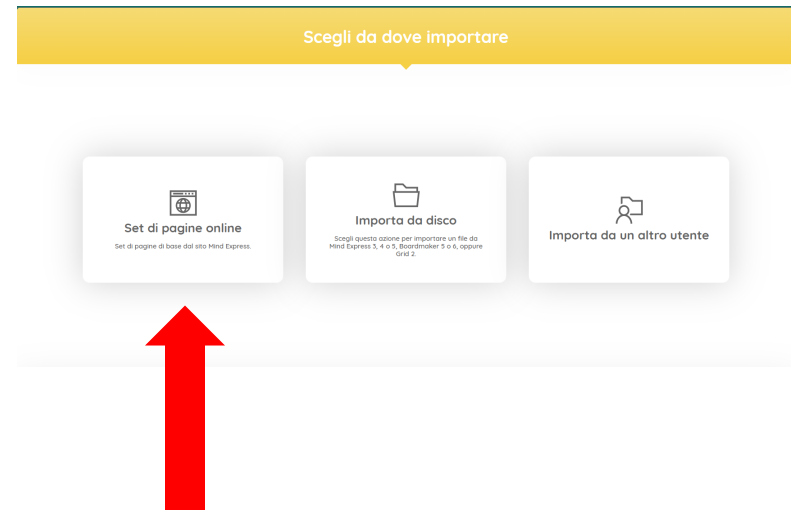



In questo set di pagine l'alunno associa quattro definizioni a quattro parole corrispondenti.



Selezionare la cella in alto a destra per posizionarsi sulla pagina nella quale inserire i propri contenuti.

Seguire le istruzioni scritte nella cella in basso.

**Attenzione:** per modificare i contenuti bisogna passare in **Modalità modifica**

Menu

Associa definizioni a parole Modello - imposta

Aggiungi parole

parola

parola

parola

parola

Aggiungi definizioni

definizione

definizione

definizione

definizione

Andare in modalità modifica (Menu > Modifica)  
Digitare una parola nei campi etichetta e messaggio delle celle della colonna a sinistra  
Digitare la definizione corrispondente nei campi etichetta e messaggio delle celle delle celle nella colonna a destra.  
Salvare le modifiche (Menu > Salva come)  
Uscire dalla modalità modifica (Menu > Modifica completata)  
Premere la freccia in basso a destra per avviare l'attività.


I comandi sono visualizzati nel pannello di modifica posizionato a destra. Il pannello compare dopo aver selezionato una cella. Per scegliere un'altra immagine, selezionare il pulsante 'immagine' e scegliere la fonte per la scelta dell'immagine. Per modificare l'etichetta, selezionare il pulsante 'etichetta' e modificare il testo. Per modificare il messaggio, modificare il testo nel riquadro azioni.

The image shows a vertical modification panel with four sections, each with a control icon and a text input field:

- Immagine:** A camera icon on the left and a trash icon on the right. The text input field contains the word "cane".
- Etichetta:** An "Aa" text icon on the left and a trash icon on the right. The text input field contains the word "cane".
- Stile:** A tag icon on the left. The text input field contains "Stile 1".
- Azioni:** A speech bubble icon on the left, a pencil icon on the top right, and a trash icon on the bottom right. The text input field contains the word "cane".


At the bottom of the panel is a grey button labeled "Aggiungi azione".

Finita la costruzione del set di pagine, costruire una risorsa diversa.

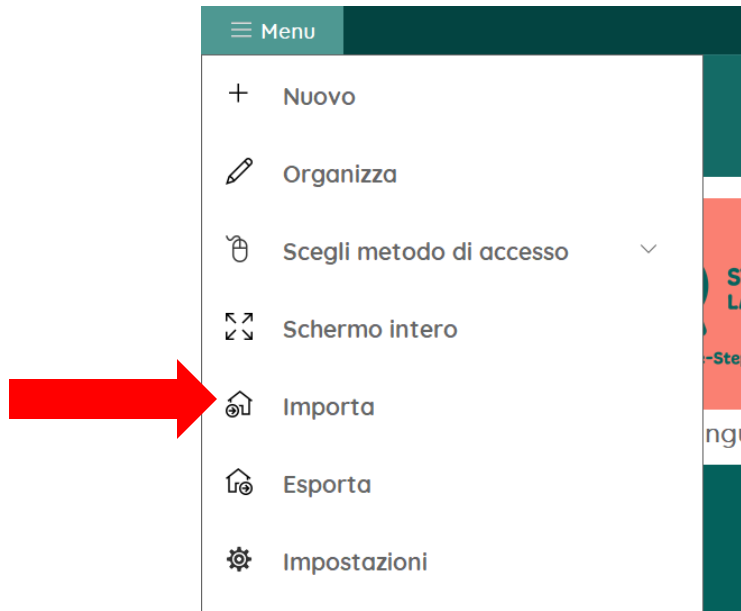


Tornare all'area utente.  
Selezionare Menu > Importa

Scegliere il comando Set di pagine online e importare il set di pagine 'Associa nomi a oggetti'

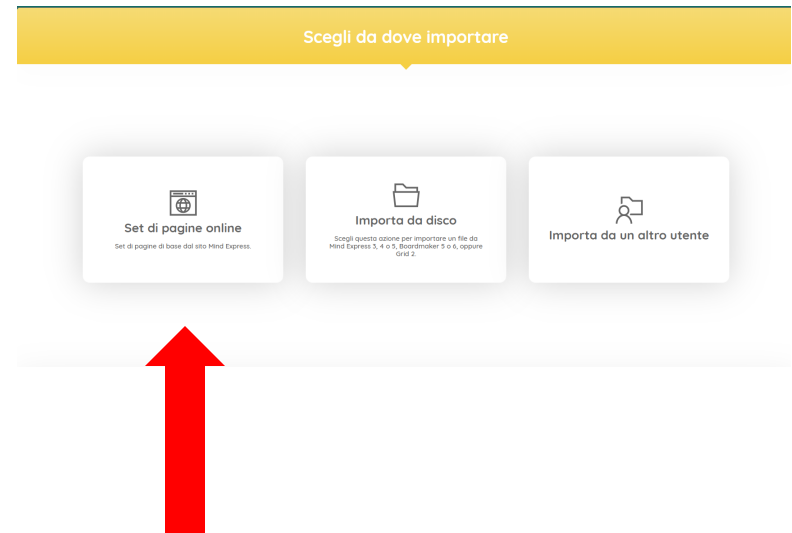


In questo set di pagine l'alunno associa parole a immagini.

Associa le tre parole alle immagini corrispondenti

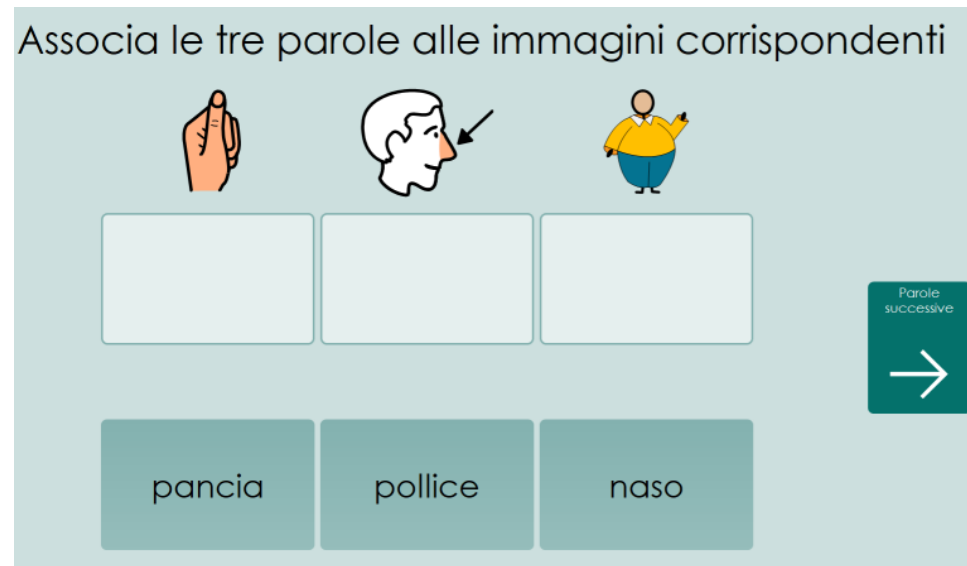

pancia      pollice      naso

Parole successive →

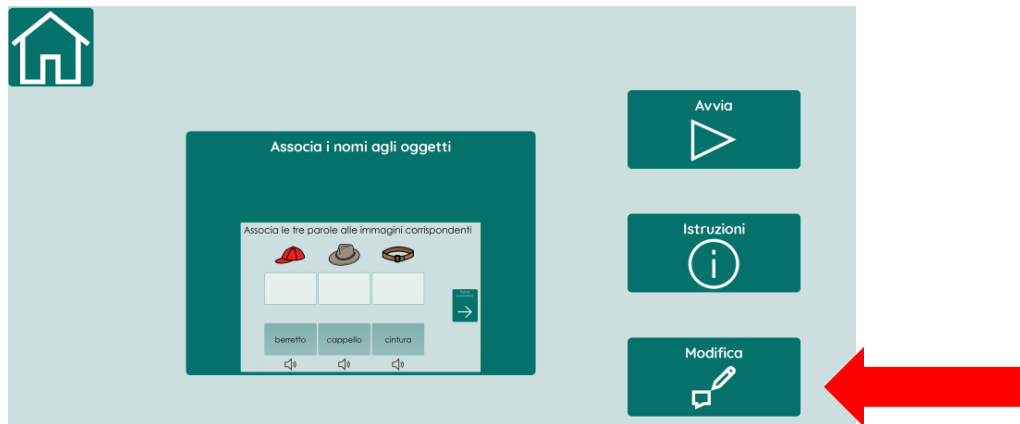

Avvia

Istruzioni


Modifica

Per inserire i propri contenuti, selezionare la cella Modifica.


Sostituire i contenuti di ogni terna con le parole e le immagini che si desidera utilizzare.



Andare in **Modalità modifica**, selezionare le celle desiderate e sostituire immagini (1), etichette (2) e messaggi (3).

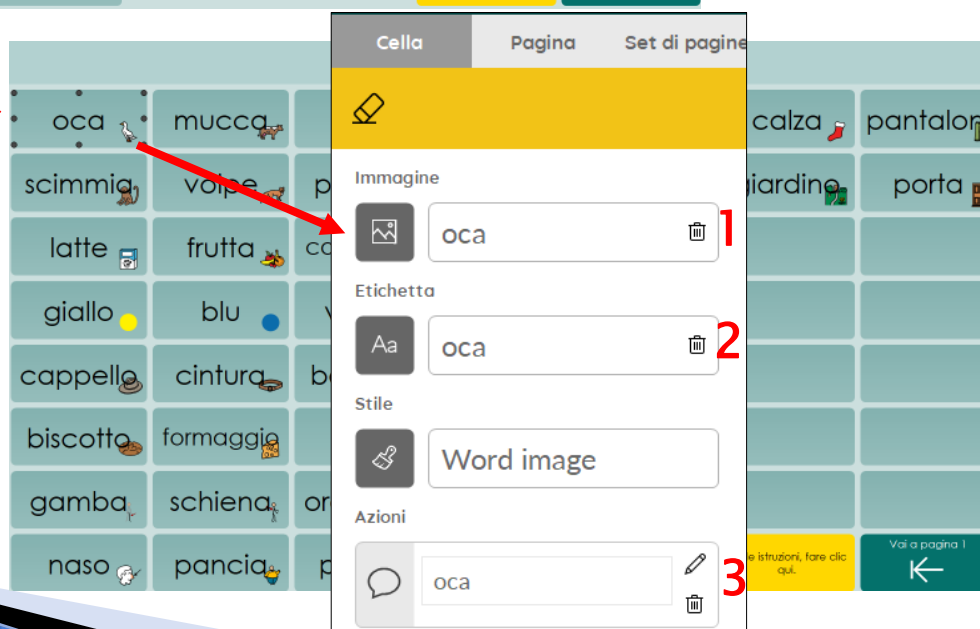


Finita la costruzione del set di pagine, costruire una risorsa diversa.

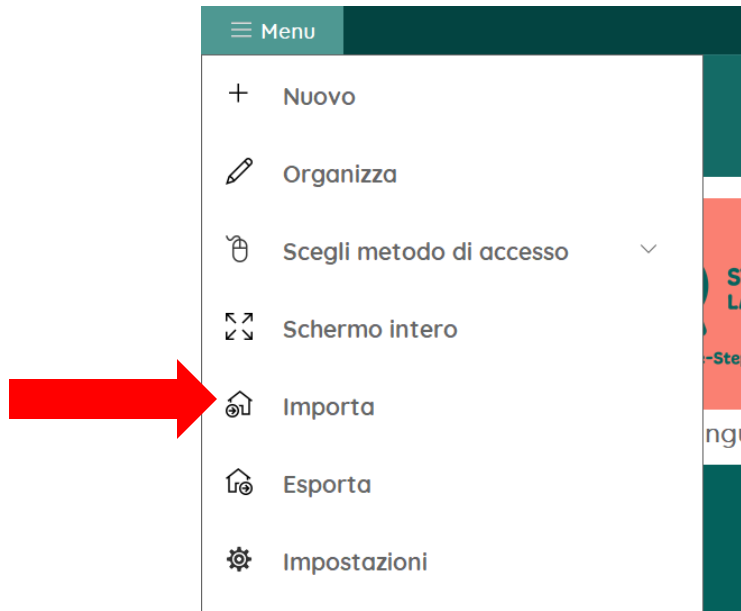

Tornare all'area utente.  
Selezionare Menu > Importa

Scegliere il comando Set di pagine online e importare il set di pagine 'Scrivi Parole - Modello'

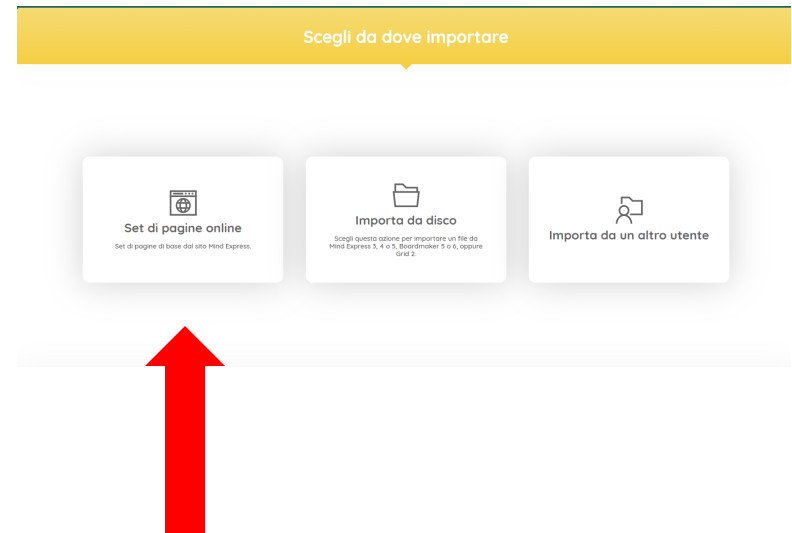

In questo set di pagine gli alunni si esercitano nella scrittura di parole.



Selezionare la cella in alto a destra per leggere le istruzioni e accedere alla pagina dove inserire i propri contenuti.



Seguire le istruzioni scritte nella cella in basso.

**Attenzione:** per modificare i contenuti bisogna passare in **Modalità modifica**

Aggiungi immagine, etichetta e messaggio in ognuna delle dieci celle.

Digitare titolo

**Titolo**

Scegli tastiera

tastiera sillabica    tastiera fonetica    nessuna tastiera

Parola modello


mostra parola    nascondi parola

In Modalità Utente,

1. Selezionare la tastiera da utilizzare.
2. Scegliere se mostrare il modello o no.
3. Andare in Modalità Modifica (premere F2 o selezionare Menu > Modifica).
4. Digitare il titolo/tema nel campo etichetta della cella con lo sfondo giallo.
5. Digitare le parole target nei campi immagine, etichetta e messaggio nelle 10 celle con lo sfondo bianco.
6. Selezionare Menu > Salva come... e salvare il set di pagine con un nome specifico.
7. Avviare l'attività.




Finita la costruzione del set di pagine, costruire una risorsa diversa.

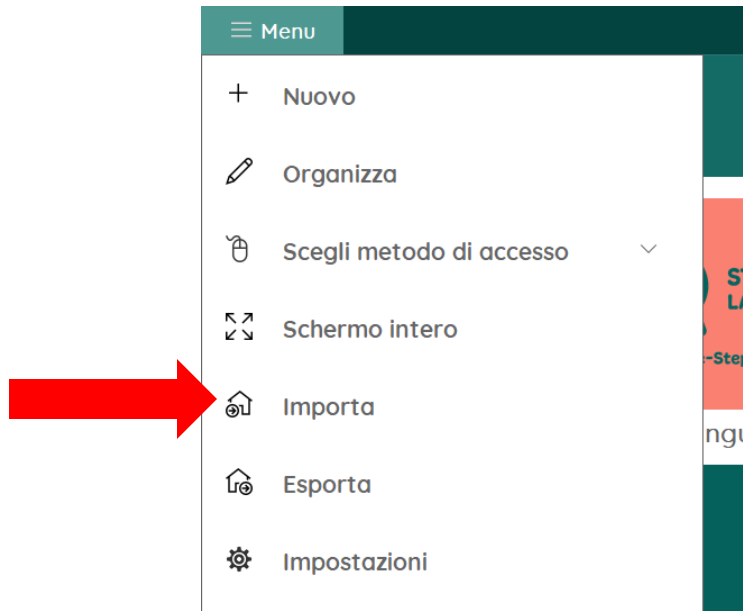

Tornare all'area utente.  
Selezionare Menu > Importa

Scegliere il comando Set di pagine online e importare il set di pagine 'Scelta Multipla - Modello'

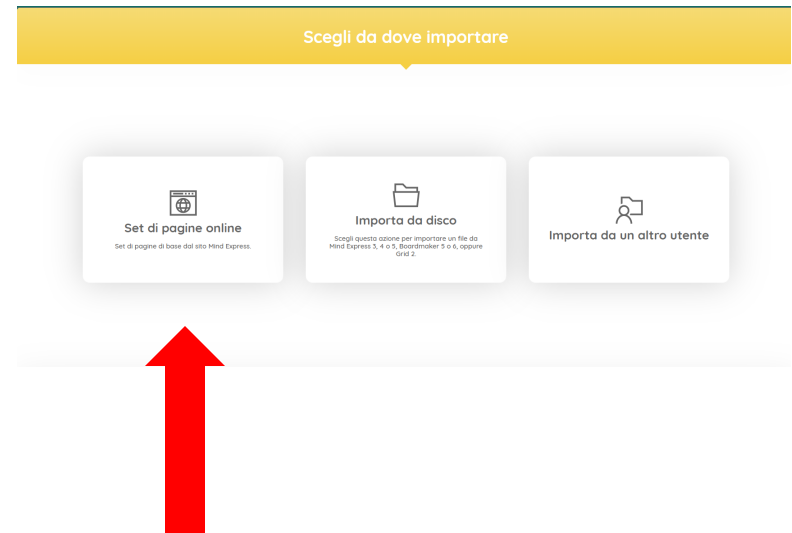

Questo modello permette di creare una serie di domande con risposte a scelta multipla



Selezionare la cella in alto a destra per leggere le istruzioni e accedere alla pagina dove inserire i propri contenuti.

Seguire le istruzioni scritte nella cella a destra.

**Attenzione:** per modificare i contenuti bisogna passare in **Modalità modifica**

Menu Scelta multipla Modello - imposta

**Domanda 1**  
Digita domanda 1  
?  
risposta esatta risposta sbagliata risposta sbagliata

**Domanda 2**  
Digita domanda 2  
?  
risposta esatta risposta sbagliata risposta sbagliata

**Domanda 3**  
Digita domanda 3  
?  
risposta esatta risposta sbagliata risposta sbagliata

**Domanda 4**  
Digita domanda 4  
?  
risposta esatta risposta sbagliata risposta sbagliata


**Domanda 5**  
Digita domanda 5  
?  
risposta esatta risposta sbagliata risposta sbagliata

**Domanda 6**  
Digita domanda 6  
?  
risposta esatta risposta sbagliata risposta sbagliata

**salva**


- Andare in modalità modifica (Menu > Modifica)
- Digitare le domande nei campi etichetta e messaggio delle celle con etichetta 'Digita domanda'.
- Digitare le risposte esatte nei campi etichetta e messaggio delle celle con etichetta 'risposta esatta'.
- Digitare le risposte errate nei campi etichetta e messaggio delle celle con etichetta 'risposta sbagliata'.
- Aggiungere un'immagine alle celle con le domande e a quelle con le risposte.
- Salvare le modifiche (Menu > Salva come).
- Uscire dalla modalità modifica (Menu > Modifica completata).
- Premere la cella 'salva' a destra per avviare l'attività.

Finita la costruzione del set di pagine, costruire una risorsa diversa.

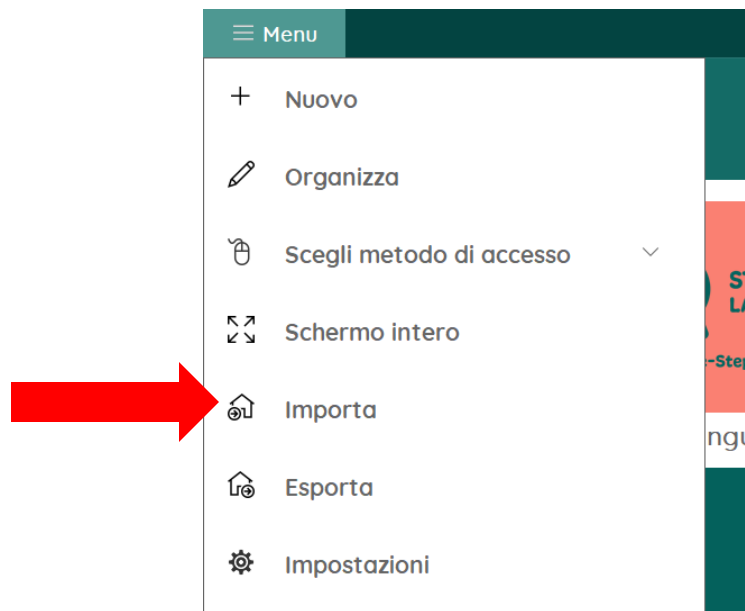

Tornare all'area utente.  
Selezionare Menu > Importa

Scegliere il comando Set di pagine online e importare il set di pagine 'Riordina gli eventi - Modello'

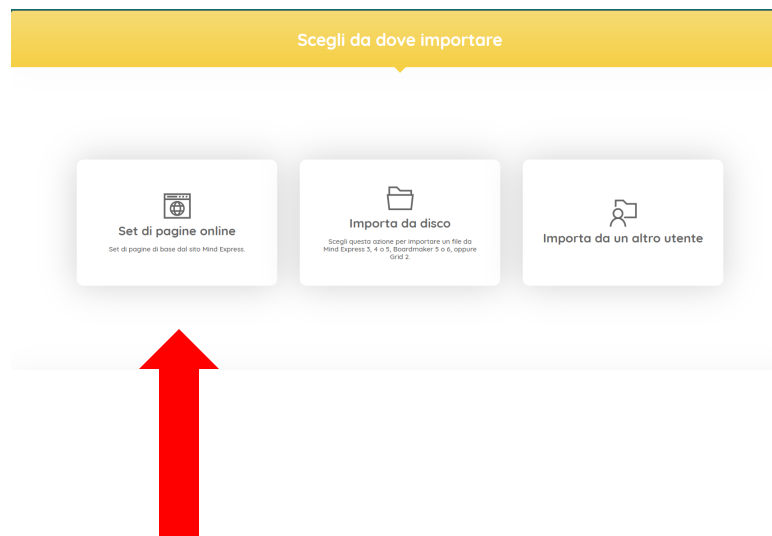

In questo set di pagine gli alunni riordinano 6 eventi o sequenze.

Metti gli eventi nell'ordine corretto. Alla fine controlla il tuo lavoro.

Una farfalla depone le uova.

Da ogni uovo esce un bruco.

Il bruco si costruisce un guscio detto bozzolo.

Nel bozzolo, il bruco si trasforma.

Dal bozzolo esce una farfalla.

Il bruco mangia e cresce.

Riordina gli eventi - Modello - capertina

Menu

Home

Riordina Eventi/Sequenze

Titolo

Diagramma di sequenza

Impostazioni

Selezionare la cella in alto a destra per leggere le istruzioni e accedere alla pagina dove inserire i propri contenuti.

Seguire le istruzioni scritte nella cella in basso.

**Attenzione:** per modificare i contenuti bisogna passare in **Modalità modifica**

Menu Riordina gli eventi - Modello - Imposta

testo evento 1

testo evento 2

testo evento 3

testo evento 4

testo evento 5

testo evento 6

1

2

3

4

5

6

1. Selezionare Menu> Modifica (o premere F2)

2. Inserire in ogni cella immagini, etichette e messaggi seguendo l'ordine corretto degli eventi.


3. Andare alla pagina di copertina (pag. 1) e digitare il titolo/tema dell'attività.

4. Selezionare Menu> Salva come

5. Salvare il set di page.


Vai a pagina 1

Finita la costruzione del set di pagine, costruire una risorsa diversa.

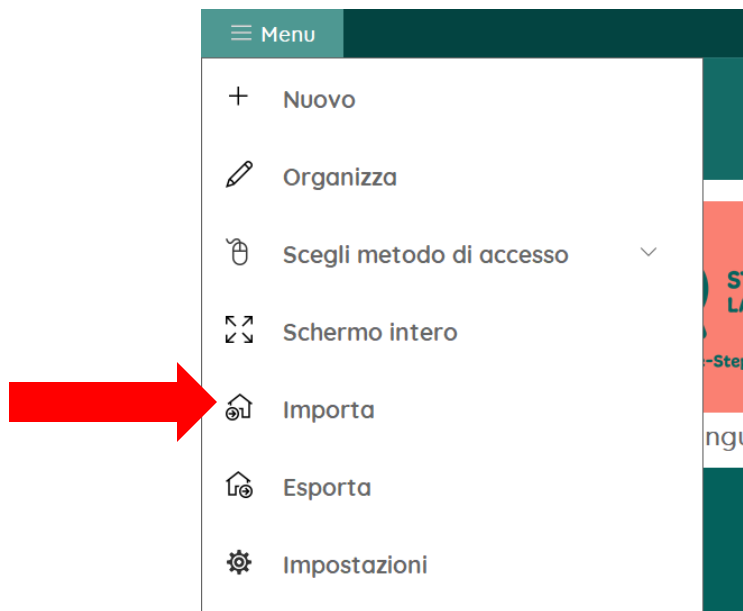

Tornare all'area utente.  
Selezionare Menu > Importa

Scegliere il comando Set di pagine online e importare il set di pagine 'Modello Libro Multimediale'

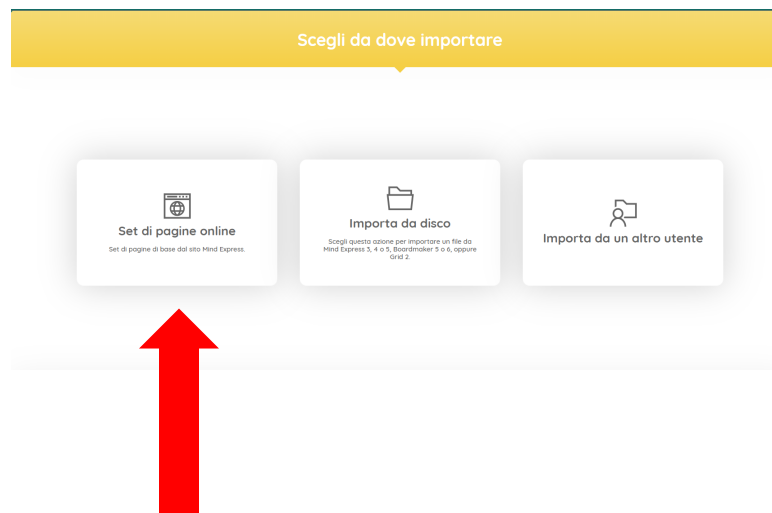



Questo modello permette di creare facilmente un semplice libro adattato.



Per accedere alle istruzioni, selezionare la cella in basso a sinistra.

Menu  Libro Multimediale-La rana - Pagina 1



La rana è un anfibio. Gli anfibi possono vivere in acqua o sulla terraferma.

← →

Andare in **Modalità modifica** per inserire immagini e testo. Inserire l'immagine nella cella grande e il testo negli spazi etichetta e messaggio della cella piccola.

**Grazie della partecipazione!**



[mfquinn@srt.com](mailto:mfquinn@srt.com)