

# Comunicare e apprendere con



A cura di Fiorella Messina  
mfquinn@srt.com

# Mind Express 5

- panoramica
- area utente
- comunicazione
- apprendimento
- risorse varie

# Software di comunicazione

iOS (iPad, iPhone, iPod)

- GoTalk NOW Ita
- The Grid
- Niki Talk
- Talk to Me

Android (smartphone)

- Piktoplus
- Verbo (player)


Windows –escluso RT–  
(computer e alcuni tablet)

- Mind Express
- Clicker 8
- The Grid
- Symwriter
- Verbo
- Boardmaker

# Software/app di comunicazione: componenti



- Sintesi vocale e registrazione
- Simboli
- Tastiera e predizione
- Grammatica
- Accesso
- Collegamenti tra tabelle
- Altre attività (didattica, mail, internet, musica, video...)

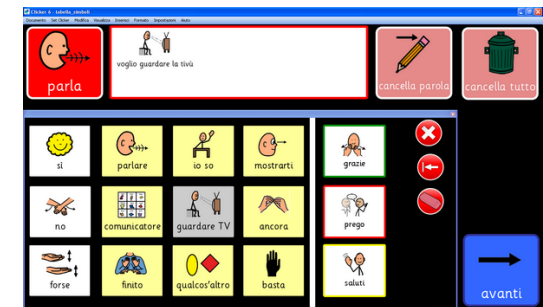

# Mind Express 5

Software autore


- efficace e flessibile
- supporta tutti i bisogni comunicativi
- facilita l'apprendimento
- permette di controllare il computer
- permette di controllare l'ambiente
- intuitivo & user-friendly
- personalizzabile
- accessibile
- facile da usare ed estremamente potente



possibilità di personalizzare aspetto, contenuti, modalità di accesso di tutti i materiali già pronti o di quelli da costruire

# Jabbla

- ditta Belga leader nel settore della comunicazione e della tecnologia assistiva
- i prodotti di Jabbla sono conosciuti in tutto il mondo e apprezzati per qualità e affidabilità.

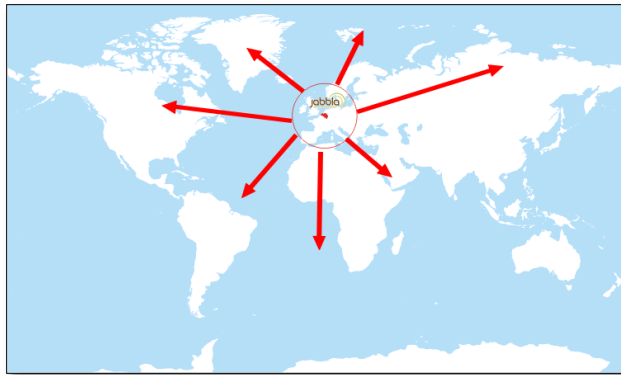

Sprint



Allora



Hey and Eddy



Vibe



Woodpecker

Tellus i6





Tellus

# Accessibilità

- mouse/ trackball/joystick
- schermo tattile
- scansione
  - uno o due sensori
  - acustica
- mouse a testa
- puntamento oculare

Irisbond, Eyeteck, Tobii, Alea, LC

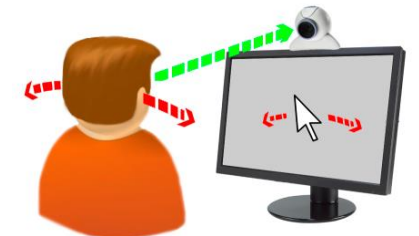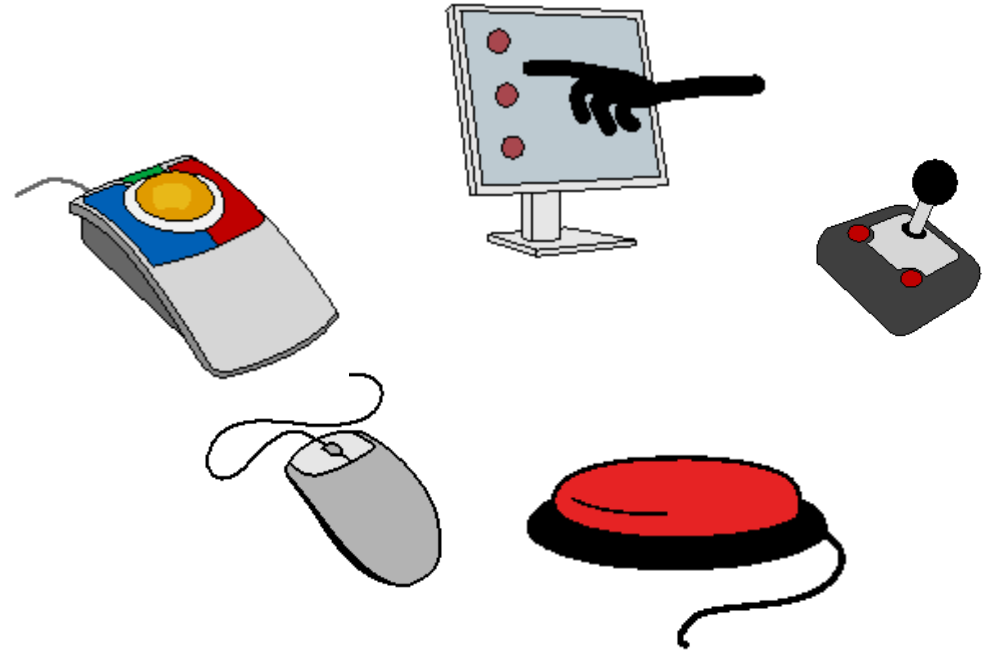



# Supporto a 360° per qualunque età e abilità

- numerose librerie di simboli: Symbolstix e Bliss sono incluse; altre librerie aggiuntive possono essere acquistate a parte
- accesso illimitato a immagini, clipart, foto, immagini da internet, gif animate
- sintesi vocale (Vocalizer, Acapaela)
- modulo di scrittura con predizione di parola e di frase e predizione alternativa in base al suono
- cella messaggio personalizzabile (solo testo, solo simboli, testo e simboli)
- modulo grammaticale
- pagine in stile griglia o stile libero
- vari metodi di accesso
- pagine popup, elenchi dinamici, pagine dinamiche
- Internet, applicazioni web, social media
- controllo computer
- controllo di altri programmi Windows
- controllo ambientale
- email, SMS, telefono
- presentazioni, esecuzione file audio e video
- orologio, promemoria, calendario, appuntamenti, agenda
- risorse per la scuola
- giochi
- modulo di programmazione avanzata in Python
- Valutazione e addestramento sensori/puntamento oculare
- Community per la condivisione di risorse

...e molto altro



# CAA: librerie di simboli in Mind Express

In Mind Express sono incluse le librerie dei Symbolstix e dei Bliss con la possibilità di aggiungere altri set di immagini.

Le foto si acquisiscono anche direttamente da Internet, scattando foto con la camera del dispositivo, o catturando lo schermo.



Symbolstix




Bliss


A collection of various dog symbols and images within a blue-bordered box. The items are arranged as follows:

- Top left: An orange dog symbol with the word "cane" above it. Below it is the label "PCS alto contrasto".
- Top middle: An orange dog symbol with the word "cane" above it. Below it is the label "PCS a colori".
- Top right: A white dog symbol with the word "cane" above it. Below it is the label "PCS B/N".
- Middle left: A photograph of a brown dog's head with a blue collar. Below it is the label "Ricerca immagini nel disco del dispositivo".
- Middle right: A yellow dog symbol with the word "cane" above it. Below it is the label "Arasaac".
- Bottom right: A small dog symbol with a blue collar and the word "cane" above it. Below it is the label "Widgit".
- Bottom left: A photograph of a golden retriever wearing glasses. Below it is the label "Ricerca diretta su Internet".
- Bottom right: A 3D rendered dog wearing sunglasses and a red collar. Below it is the label "Gif animate".


# CAA: librerie di simboli in Mind Express

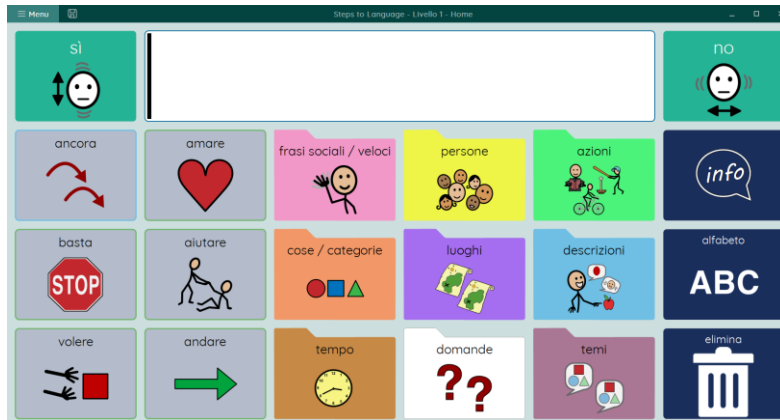

SymbolStix

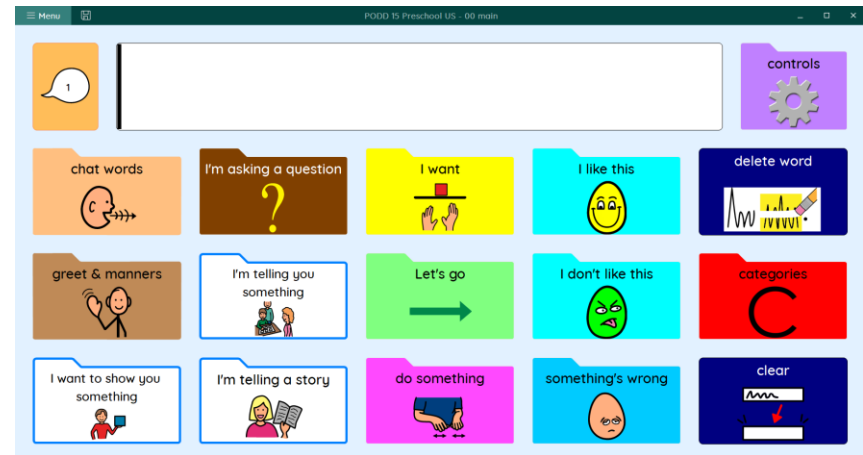

PCS

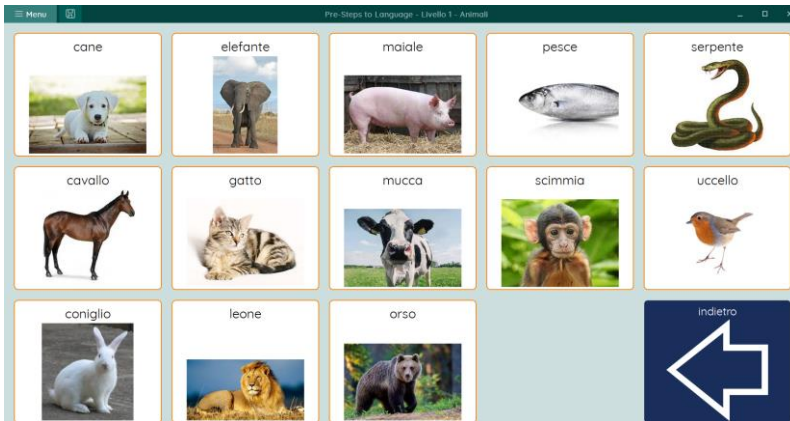

Foto



PCS alto contrasto

# Sintesi vocale

Mind Express consente di comporre parole e frasi selezionando immagini e simboli; le frasi così composte possono essere lette ad alta voce grazie alla sintesi vocale di alta qualità (Acapela, Vocalizer) integrata nel programma. È supportata anche la lettura fonetica.


Voci disponibili in molte lingue oltre all'Italiano.



Esempio faciLibri- scrivi parole  
La tastiera legge le lettere foneticamente

# Scrittura

Mind Express integra un programma di videoscrittura e un **modulo grammaticale** per comporre testi anche col supporto dei simboli e, **in automatico, e associare correttamente** verbi a soggetti e aggettivi a nomi.

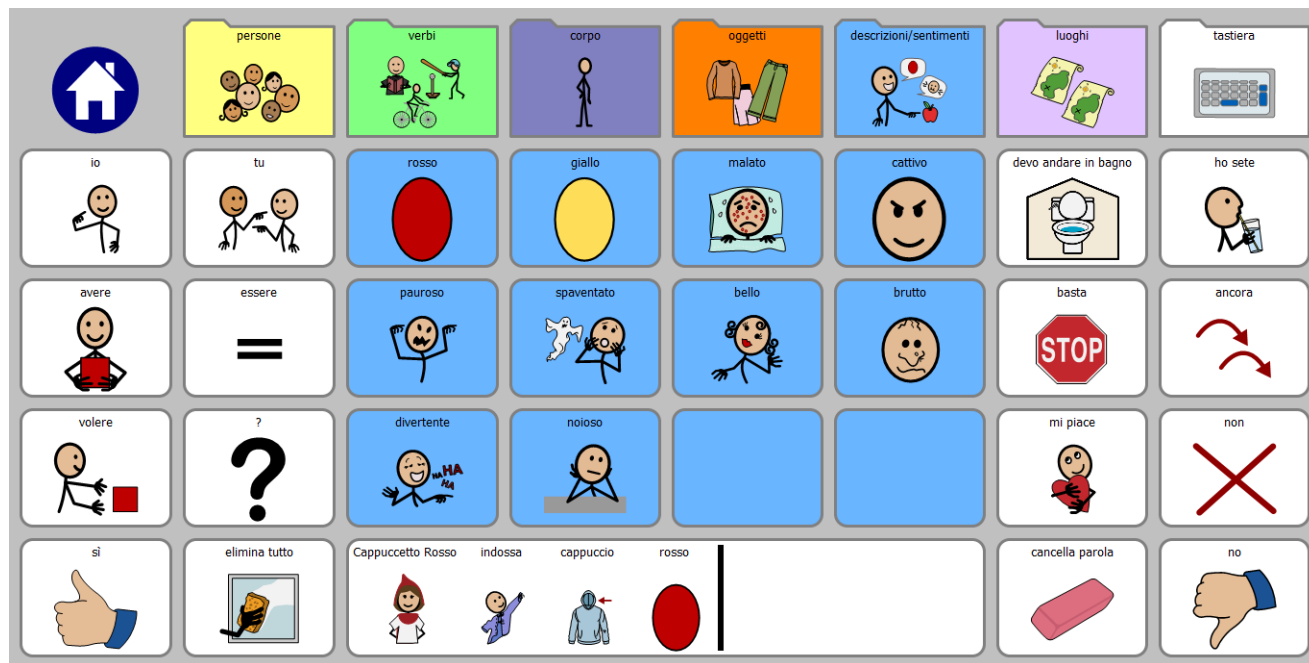

Esempio faciLibri - selezionando il soggetto "Cappuccetto Rosso" qualunque verbo viene coniugato alla terza persona singolare


# Scrittura

Esistono varie tastiere con celle di predizione e frasi personalizzate che facilitano e velocizzano la produzione scritta e la comunicazione.



# Scrittura


Ci sono tastiere alfabetiche o QWERTY, tastiere per scrivere solo in minuscolo o solo in maiuscolo e anche tastiere fonetiche per lavorare sui suoni della lingua e le loro combinazioni.

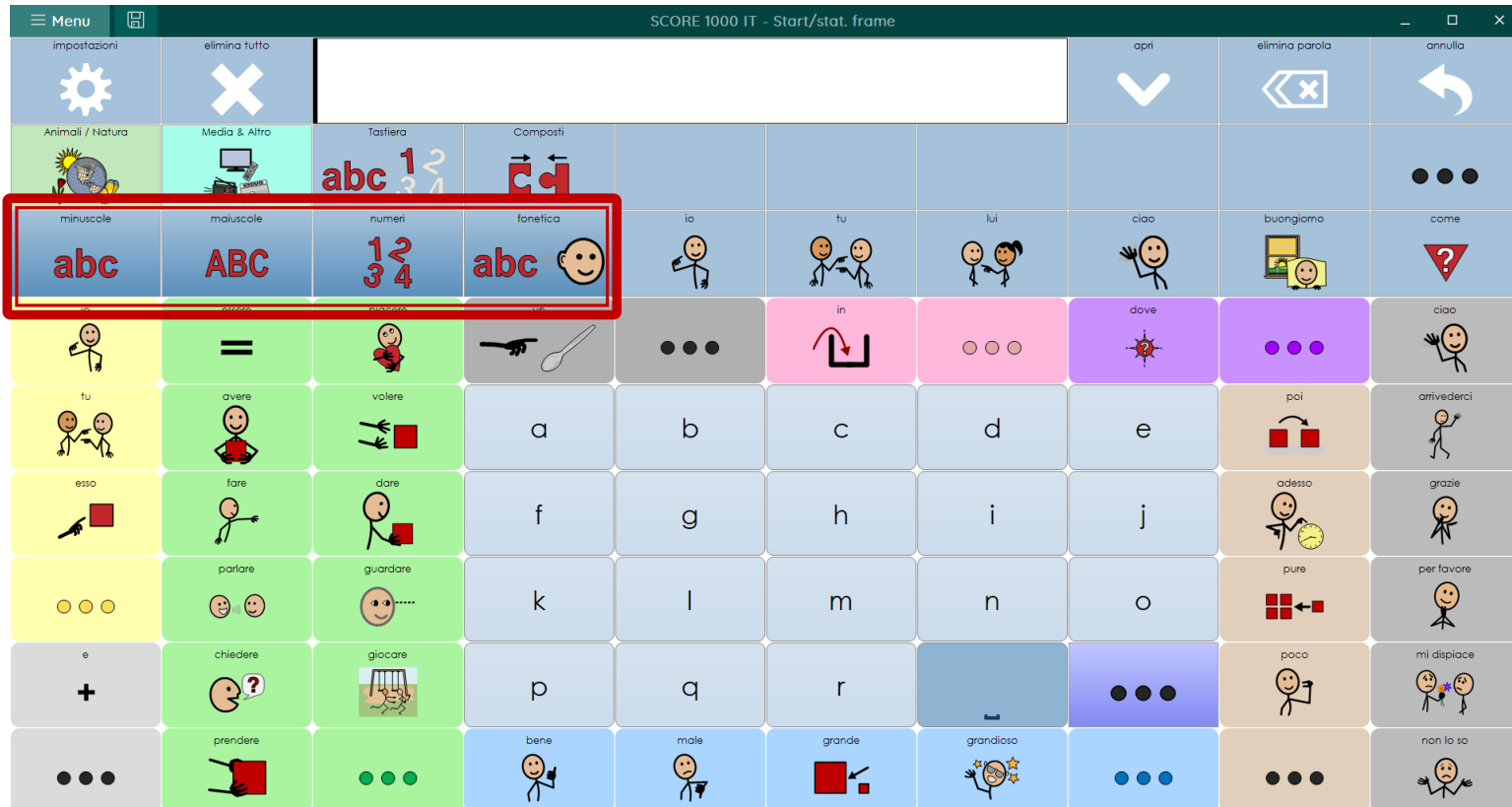

SCORE 1000

# Comunicazione

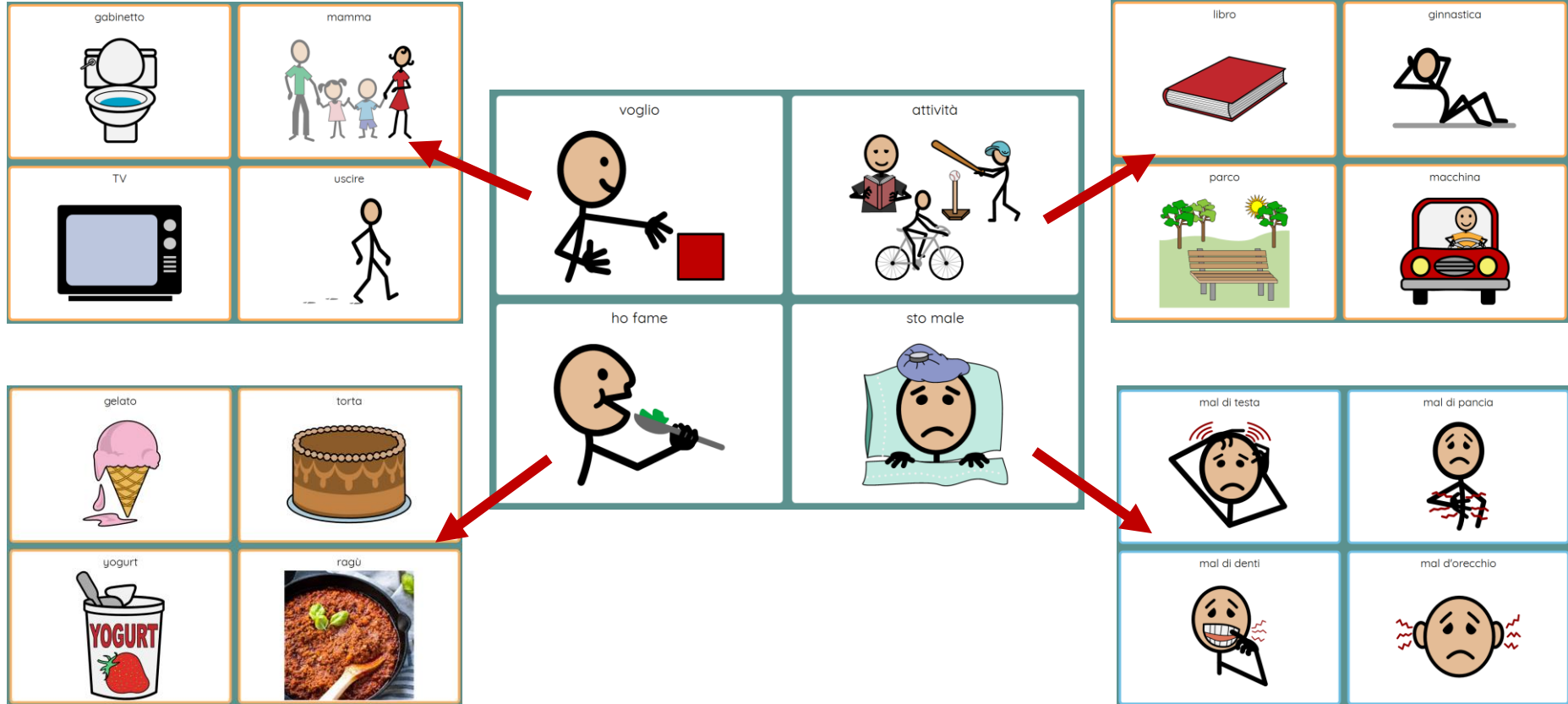

## Comunicazione con simboli: Tabella semplice





# Comunicazione


## Comunicazione con simboli: Tabella tematica

palla	guinzaglio	osso	collare	coda	bere	uovo	bruco	ramo	foglia
cuccia	Bilù			croccantini	deporre	farfalla			crisalide
pappa				dentro	strisciare				cielo
giocare				molto	mangiare				nettare
uscire	mangiare	saltare	nuotare	veloce	costruire	crescere	colorato	fuori	insetto
abbaiare	muovere	dormire	correre	intelligente	volare	diventare	femmina	attorno	dentro

io	volere	fare	aggiungere	saltare	cosa	dove	chi				
tu	no/non	costruire	sottrarre	aiutare	righello	uguale	diverso				
mio	vedere	misurare	moltiplicare	problema	scheda	più grande di	più piccolo di				
insegnante	piacere	avere bisogno	dividere	calcolatrice	turno	sequenza	finito				
numero	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 2 3 4	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

# Comunicazione

## Comunicazione con simboli: Steps to Language 3

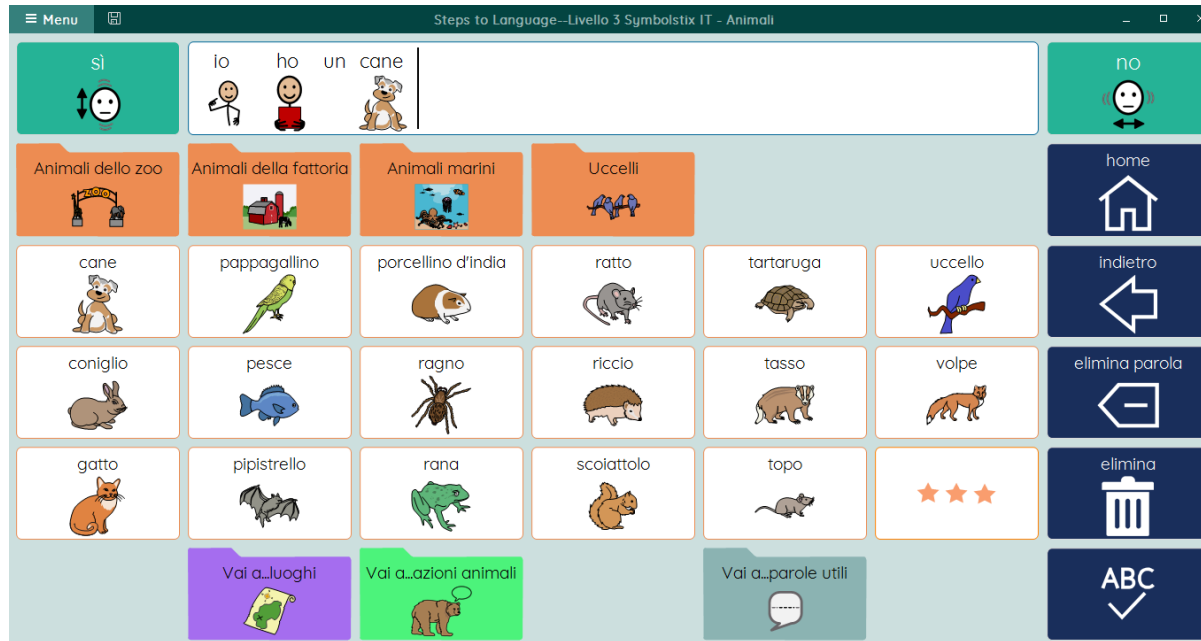

Grazie all'elaboratore testi incluso nel software è possibile scrivere, salvare, stampare, leggere ad alta voce testo e messaggi. Un modulo grammaticale integrato supporta la scrittura e offre la coniugazione automatica, l'uso corretto del singolare o del plurale e altre funzioni grammaticali disponibili nel pannello delle azioni.

# Comunicazione col supporto dei simboli


## Comunicazione con simboli: SCORE 400

Score 400 IT - Avvio/stat. frame

Impostazioni	elimina tutto	io	ho	un	cane	noi	domani	giocheremo	con	la	palla	elimina parola
Tempo libero	sport	Giochi	Giocattoli	PC / telefono cellulare	Extra 1	Extra 2						
io	è	ama	un		in		dove				ciao	
tu	ha	vuole		palla		lego	Giocattoli	poi			grazie	
esso	fa	abb	si traveste		bambola	costruzioni		adesso			per favore	
	parla	guarda			tombola		giocattolo	pure			mi dispiace	
e	chiede	gioca	uno					poco			non lo so	
	prende		bene	male	grande	grandiosa					basta	


# Comunicazione per utenti alfabetizzati

## Comunicazione solo testo: Amego

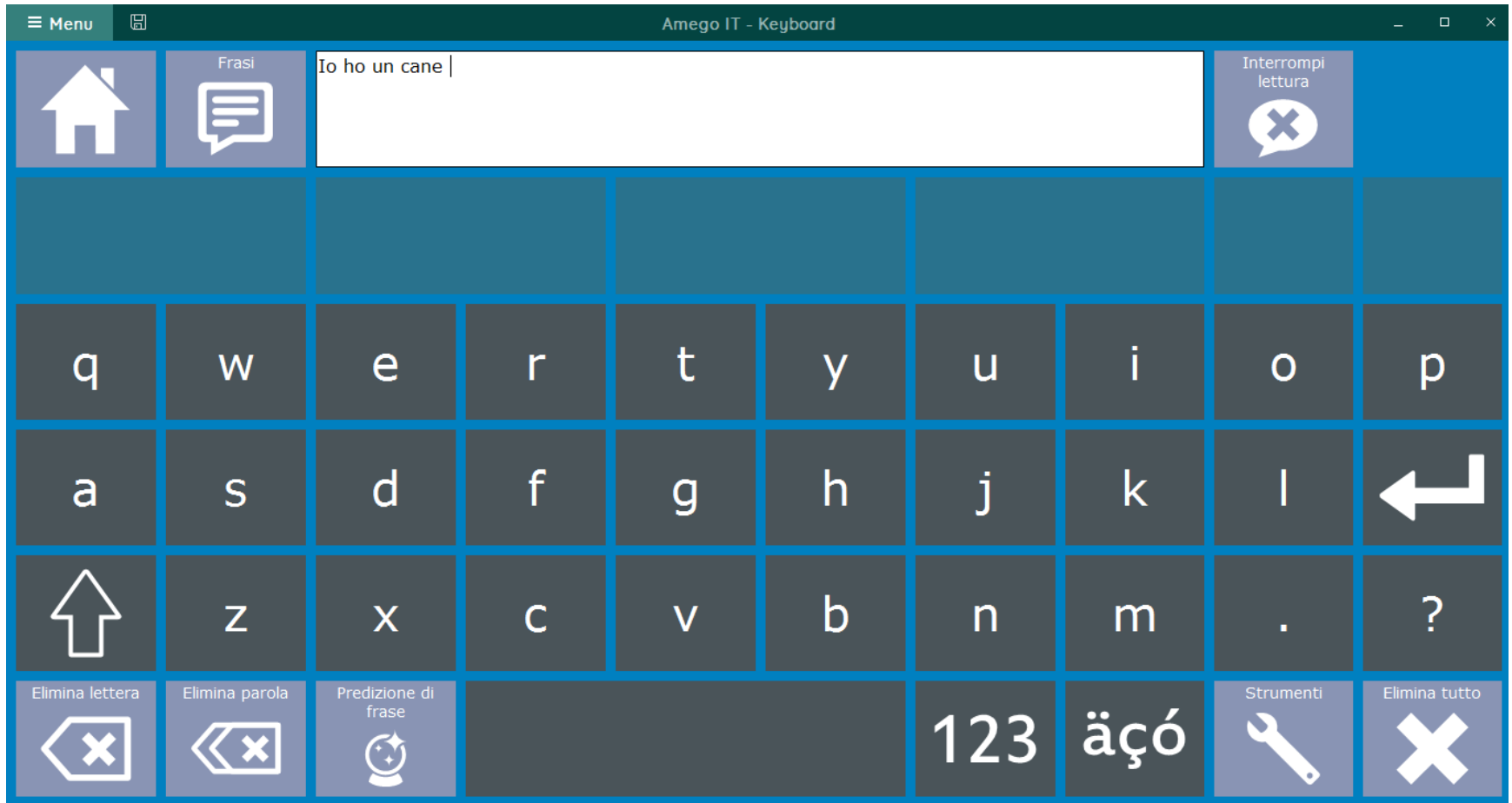

# Comunicazione

## Comunicazione solo testo: AlphaCore

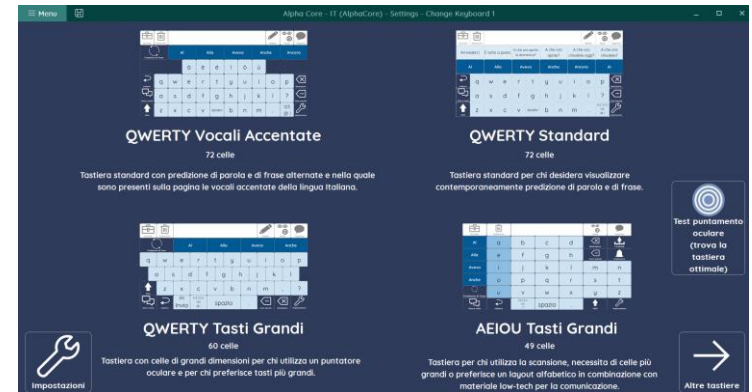


## 9 tastiere



# Comunicazione

## Comunicazione solo testo: AlphaCore

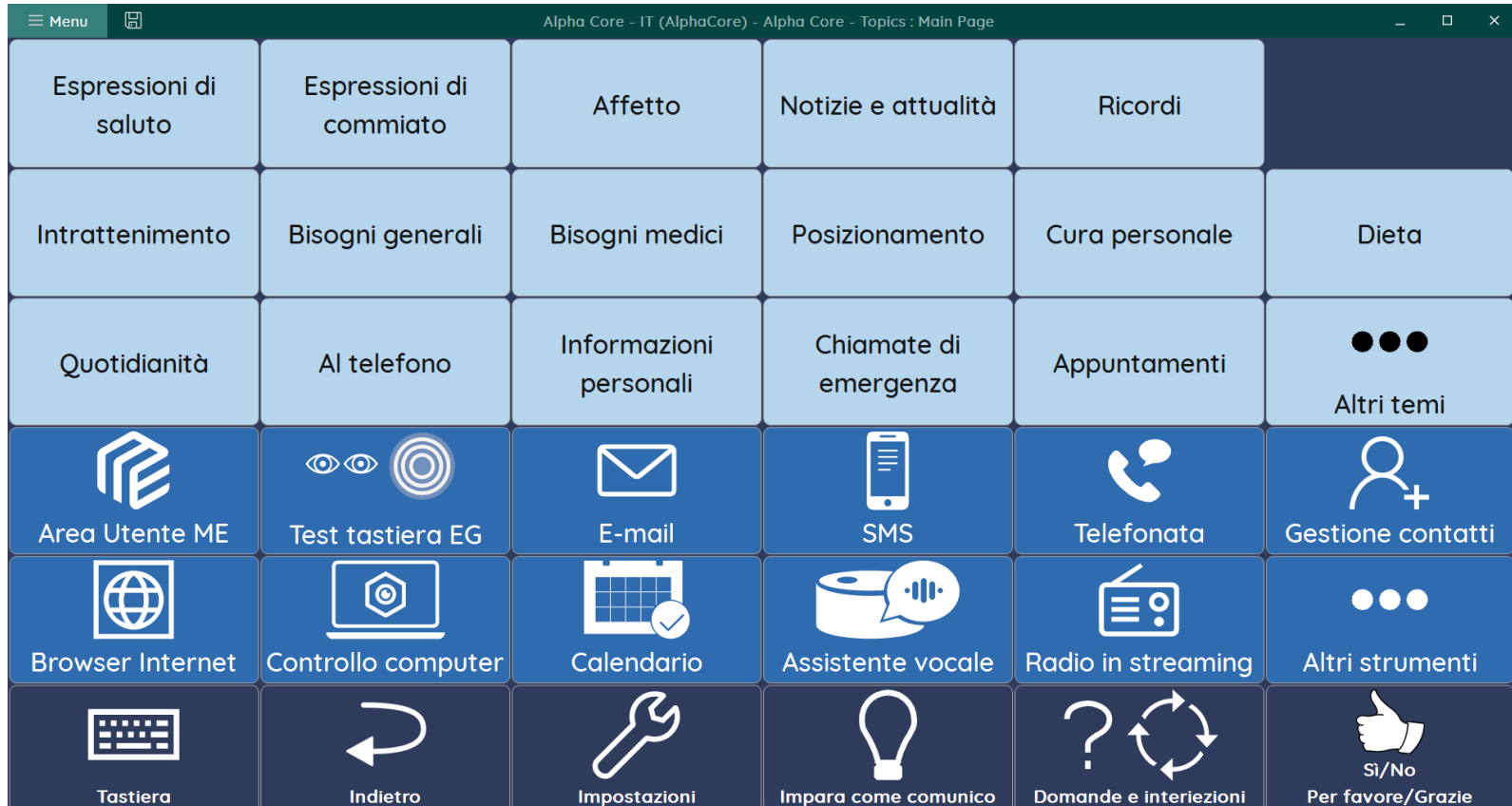

Messaggi già pronti e numerose applicazioni per utenti alfabetizzati




# Comunicazione

## Scena visiva





# Materiali educational

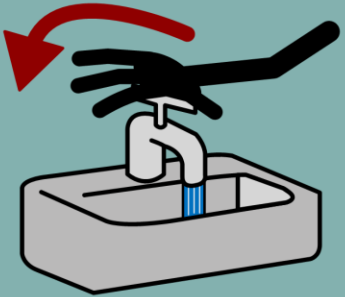

Apri il rubinetto.

Leggi pagina

Avanti

Stop

Libro/Storia sociale



La rana è un anfibio. Gli anfibii possono vivere in acqua o sulla terraferma.


You Tube

←

→

Libro multimediale


# Materiali educational

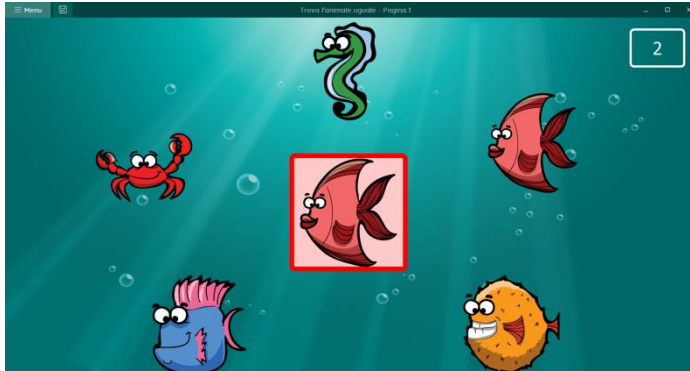

Trova l'animale uguale



Gioca con le parole

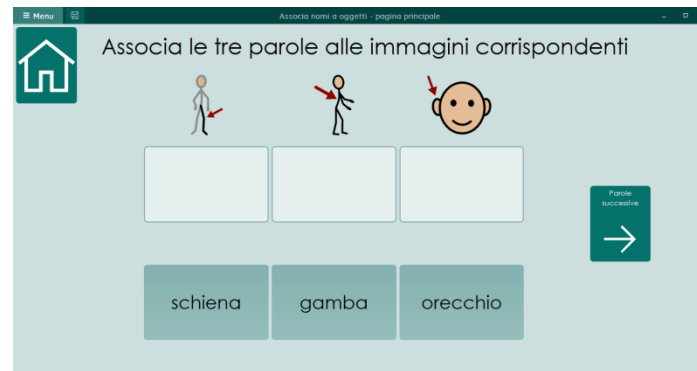





Associa nomi e oggetti

Personalizzazione dei contenuti

# Materiali educational

Aggiungi immagine





Aggiungi etichetta e messaggio

	farfalla
	nettare
	bruco
	bozzolo

Andare in modalità modifica (Menu > Modifica)  
Aggiungere un'immagine nelle celle della colonna a sinistra  
Aggiungere una parola nei campi etichetta e messaggio delle celle nella colonna a destra.  
Salvare le modifiche (Menu > Salva come)  
Uscire dalla modalità modifica (Menu > Modifica completata)  
Premere la freccia in basso a destra per avviare l'attività.


Pagina di setup

Trascina ogni parola nella cella sotto l'immagine corrispondente. Alla fine, controlla il tuo lavoro.

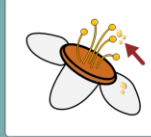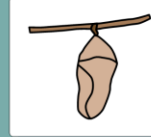
			
bozzolo	nettare	bruco	farfalla

Esercizio finito

# Materiali educational

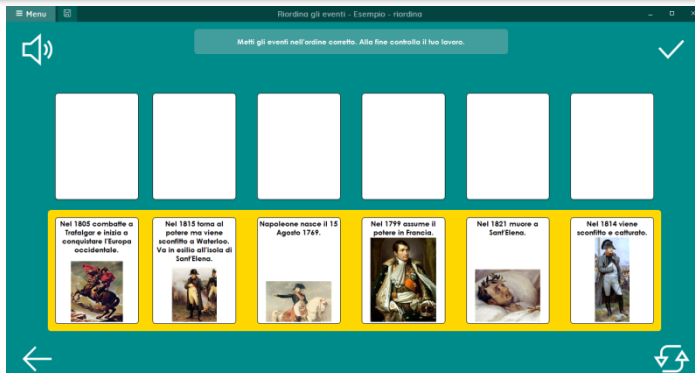

Riordina gli eventi

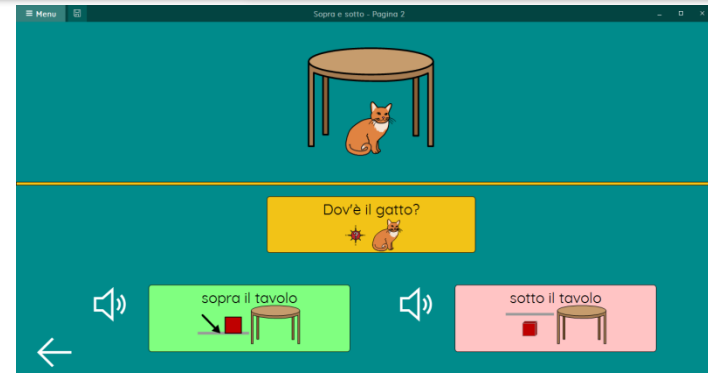

Sopra o sotto?






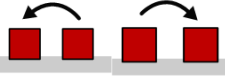







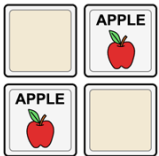

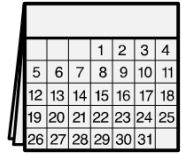

Facilibri- Cappuccetto Rosso e Small



Problemi e operazioni

Personalizzazione dei contenuti

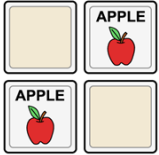
# Materiali educativi
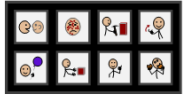
<p>mi presento</p> 	<p>termometro emozioni</p> 	<p>sequenza 3 step</p> 	<p>prima dopo scegli l'argomento</p> 	<p>video modeling</p> 
<p>storia sociale lavare le mani</p> 	<p>trova la coppia emozioni</p> 	<p>sequenza 3 step Sorpresa</p> 	<p>timer</p> 	<p>tabella</p> 
<p>storia sociale il prelievo del sangue</p> 	<p>trova la coppia emozioni - foto</p> 	<p>routine 5 step</p> 	<p>agenda/calendario</p> 	<p>crea la faccia</p> 

Risorse Autismo


# Materiali educacional

Lavarsi le mani

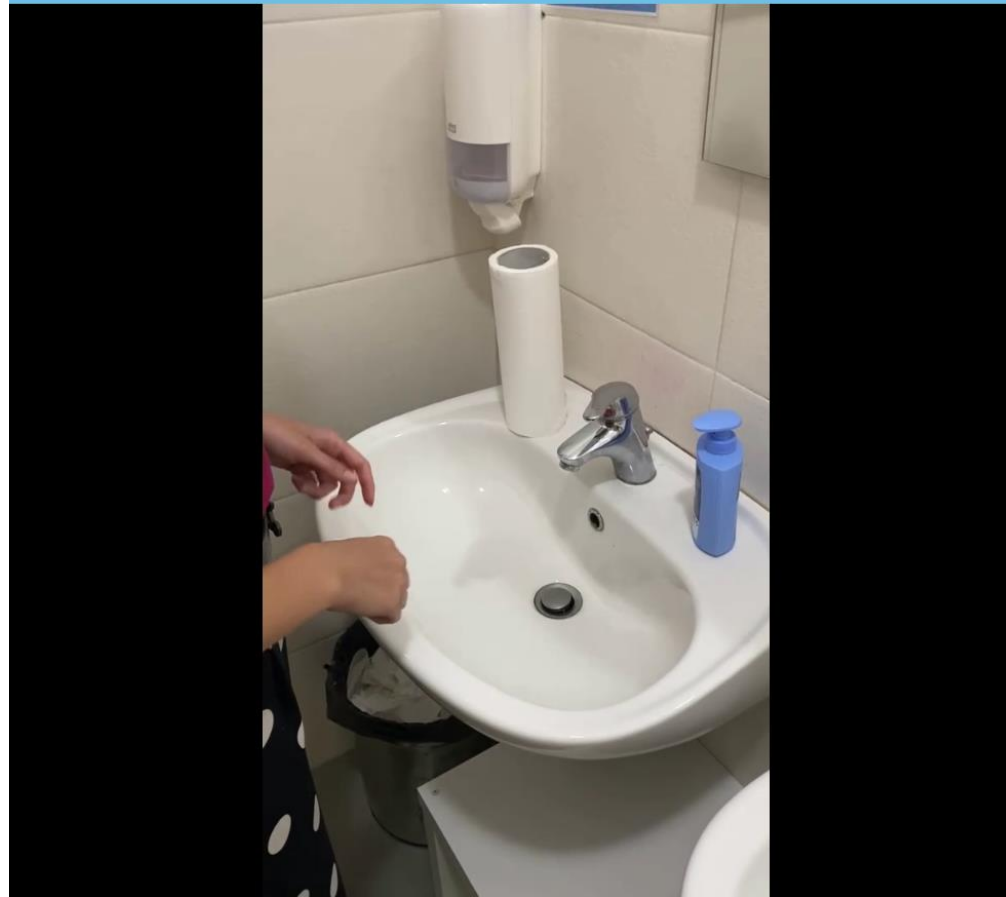


Video Modeling

# Materiali per chi usa i sensori

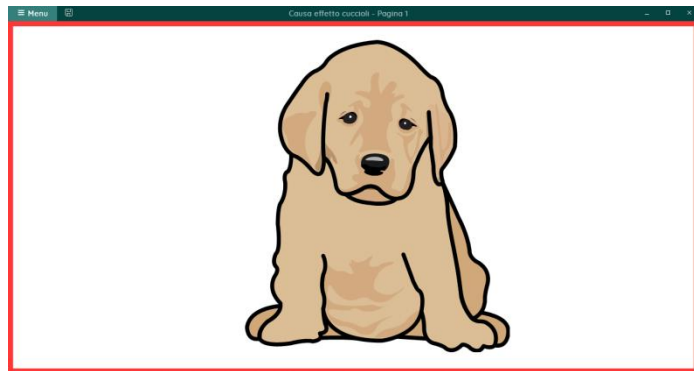


Causa Effetto

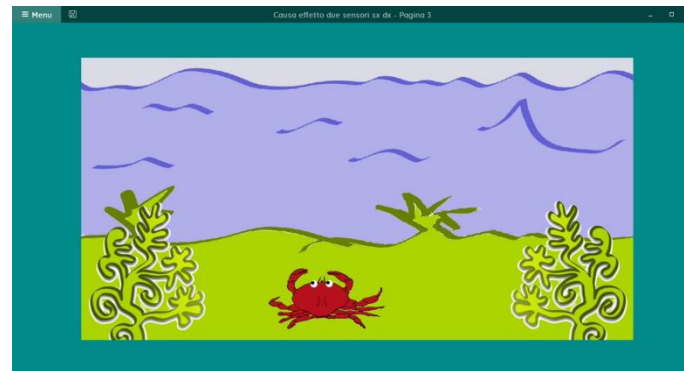

Causa Effetto 2 sensori




Scena animata

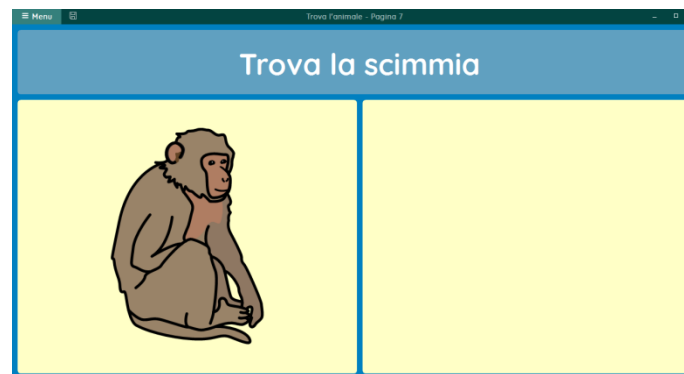


Trova l'animale



# Materiali per chi usa un puntatore oculare

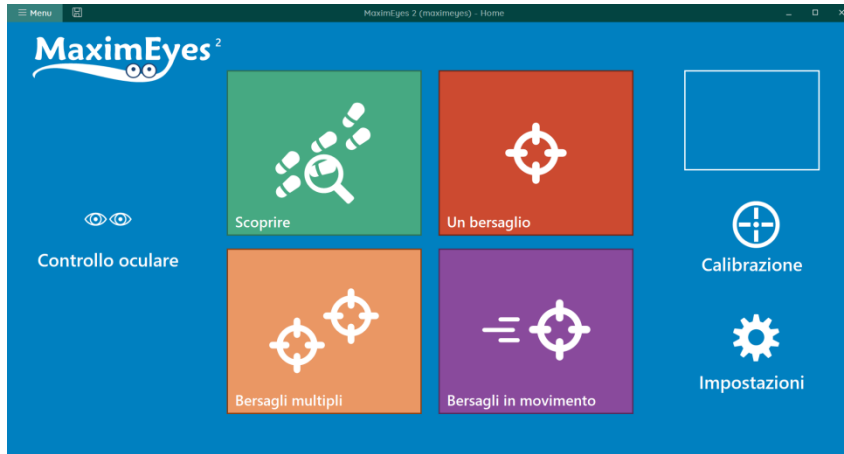


Controllo oculare: MaximEyes

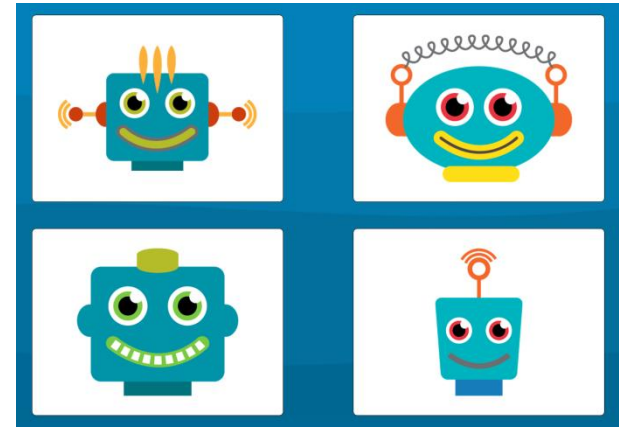


costruire



suonare

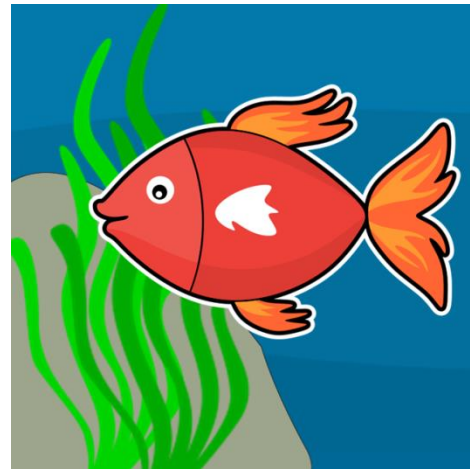


colorare

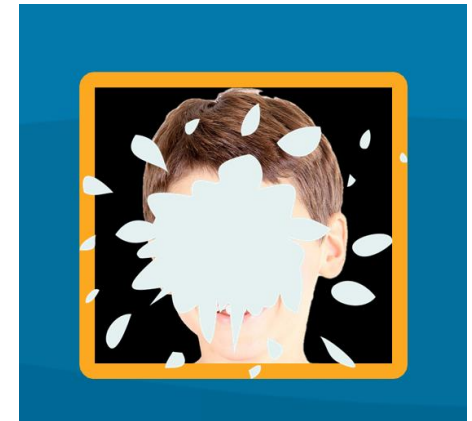


giocare

# Giochi e musica

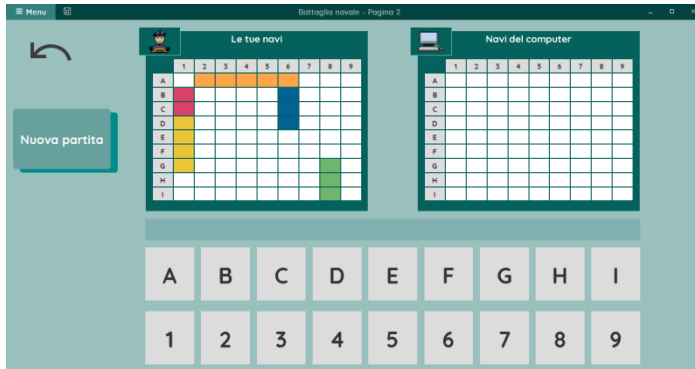


Battaglia navale

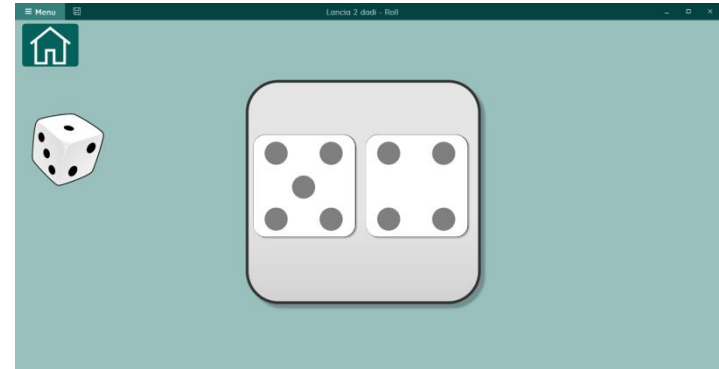


Lancia i dadi



Memory

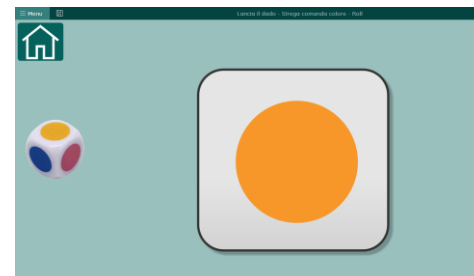


Strega comanda colore

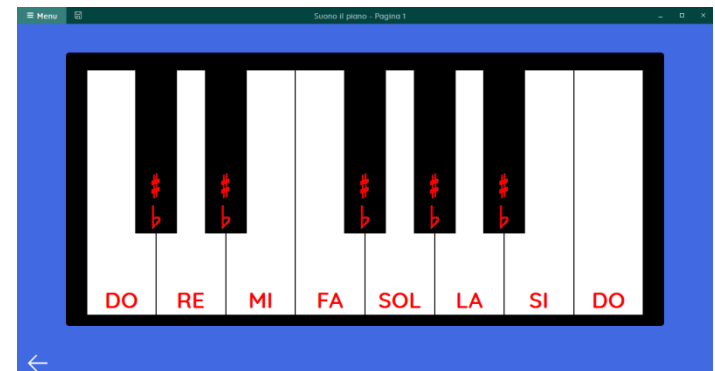

Suono il piano


# App

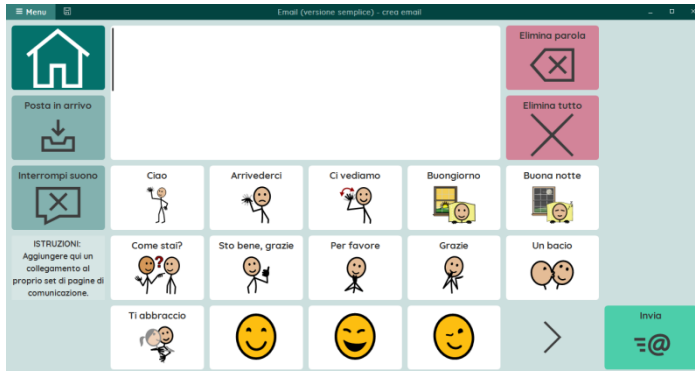


Posta elettronica



Video

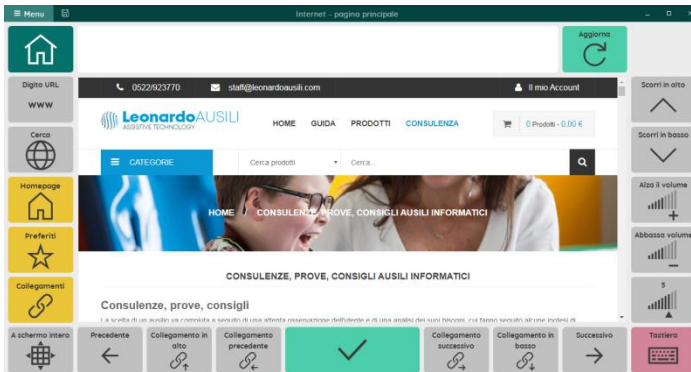

Internet

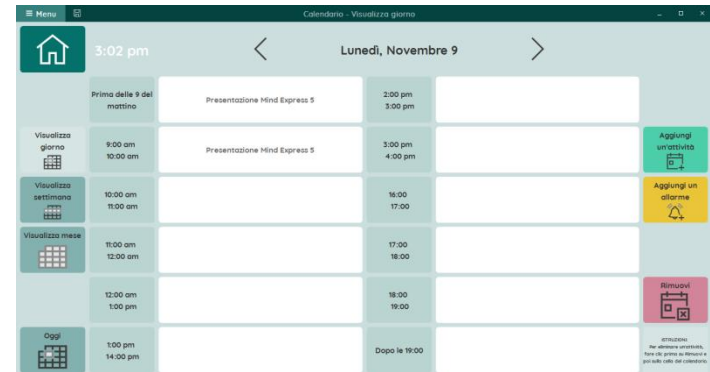

Calendario

# Scaricare il demo di Mind Express

- ▶ Versione completa
- ▶ Dura 30 gg

1. Collegarsi a questo indirizzo: [www.jabbla.com/it/scaricare-demo/](http://www.jabbla.com/it/scaricare-demo/)

## Scaricare la versione dimostrativa

È possibile provare **Mind Express 5** per 60 giorni e senza alcuna limitazione! Scopri le nuove funzioni, l'estrema facilità d'uso della versione 5. Importa e prova tutti i set di pagine inclusi nel software o i materiali condivisi nel sito Mind Express.

Compilare il modulo sottostante per richiedere il file di installazione e le istruzioni per la procedura di installazione.

- Autorizzo Jabbla a trattare i dati personali inseriti in questo modulo in conformità con [l'informativa sulla privacy](#).

Richiesta demo

2. Compilare il modulo con i propri dati e fare clic su "Richiesta demo"



3. Scaricare il programma di installazione dal link ricevuto e installare il software nel proprio dispositivo

# File Demo

## Avvio Mind Express –Login utente



- utenti
- impostazioni utente
- area utente

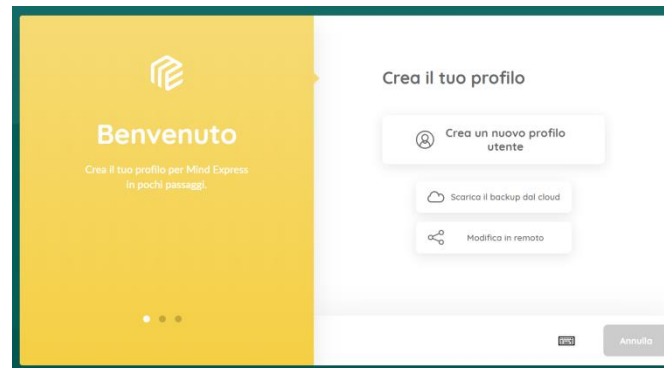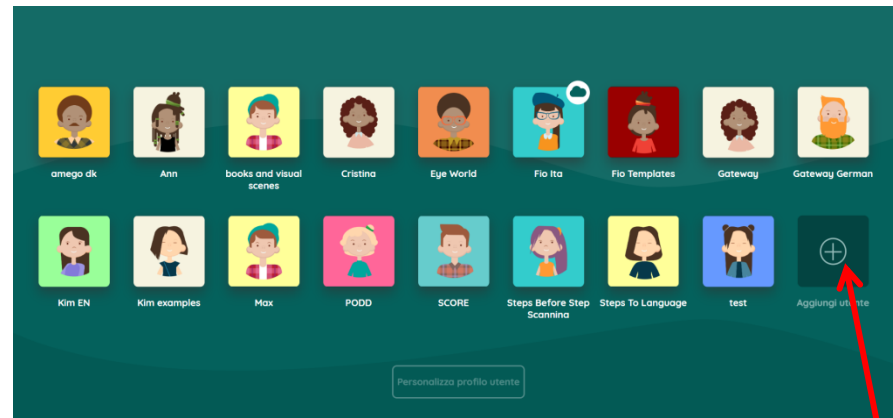

## Creazione nuovo utente

# Area Utente

## Scegliere la fonte

Scegli da dove importare



### Set di pagine online

Set di pagine di base dal sito Mind Express.



### Importa da disco

Scegli questa azione per importare un file da Mind Express 3, 4 o 5, Boardmaker 5 o 6, oppure Grid 2.



### Importa da un altro utente

# Materiali condivisi sul sito



## Set di pagine online

Set di pagine di base dal sito Mind Express.

Risorse online per Mind Express, create dal nostro team o condivise dagli utenti.  
Esplora, seleziona e importa!

- Comunicazione con simboli
- Comunicazione solo testo
- Giochi e musica
- Materiale didattico
- App

Usato frequentemente

Più opzioni di ricerca ▾

Risorse per disturbo dello spettro autistico

Creato da Jabbla  
18-11-2021, 101 Scarica  
Italiano

Set di materiali dedicati ad utilizzatori con disturbo dello spettro autistico: comprende attività di comunicazione simbolica, riconoscimento delle emozioni, video modeling, storie sociali e altro ancora.

[Altre informazioni](#)

faciLibri--Cappuccetto Rosso e La storia di Small

Creato da Leonardo AusiliOnline  
05-10-2021, 53 Scarica  
Italiano

Il progetto faciLibri è stato ideato per aumentare le competenze di literacy nei bambini che presentano bisogni comunicativi complessi e che si avvalgono del supporto di strategie di Comunicazione Aumentativa Alternativa. Literacy significa comprendere, utilizzare e riflettere su...

[Altre informazioni](#)

Creato da Jabbla  
05-10-2021, 17 Scarica  
Italiano

Questo set di pagine permette di inviare e ricevere messaggi con WhatsApp all'interno di...




Importa (1) →




# Materiali condivisi sul sito

---


## Risorse consigliate da importare:

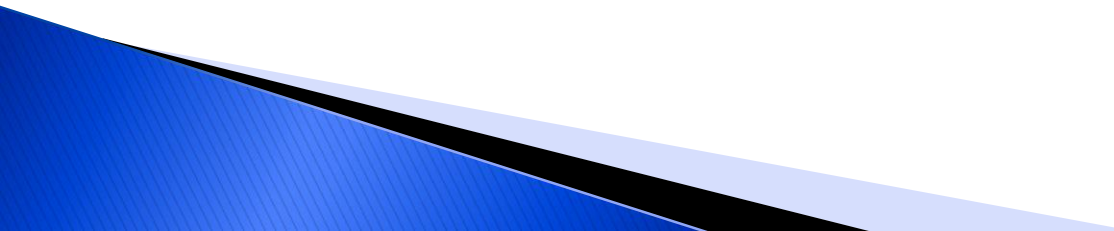- Modello libro multimediale
  - EZ Book Modello
  - EZ Book Esempio: lavare le mani
  - Lancia il dado: strega comanda colore
  - Tabella semplice
  - Associa nomi a oggetti
  - Cose in comune
  - Riordina gli eventi – Modello
  - Tastiera con predizione, messaggi frequenti e foto
- 

# Organizzare l'area utente

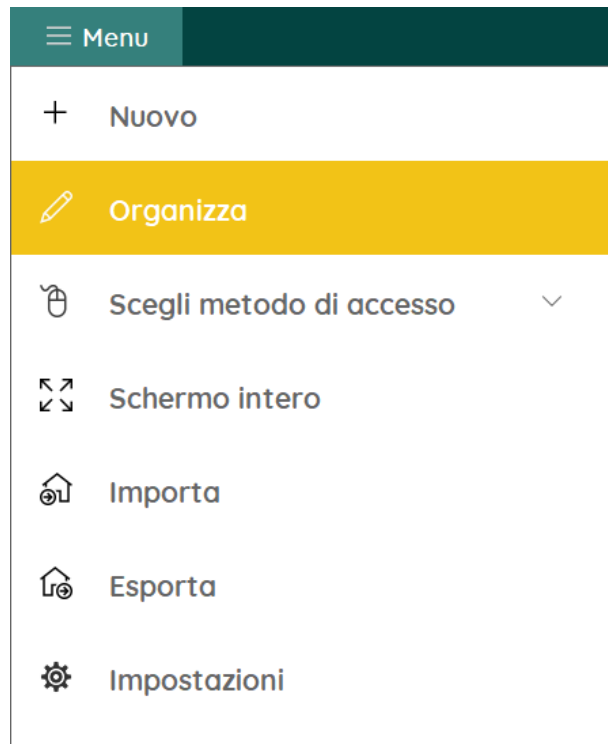



## Menu>Organizza

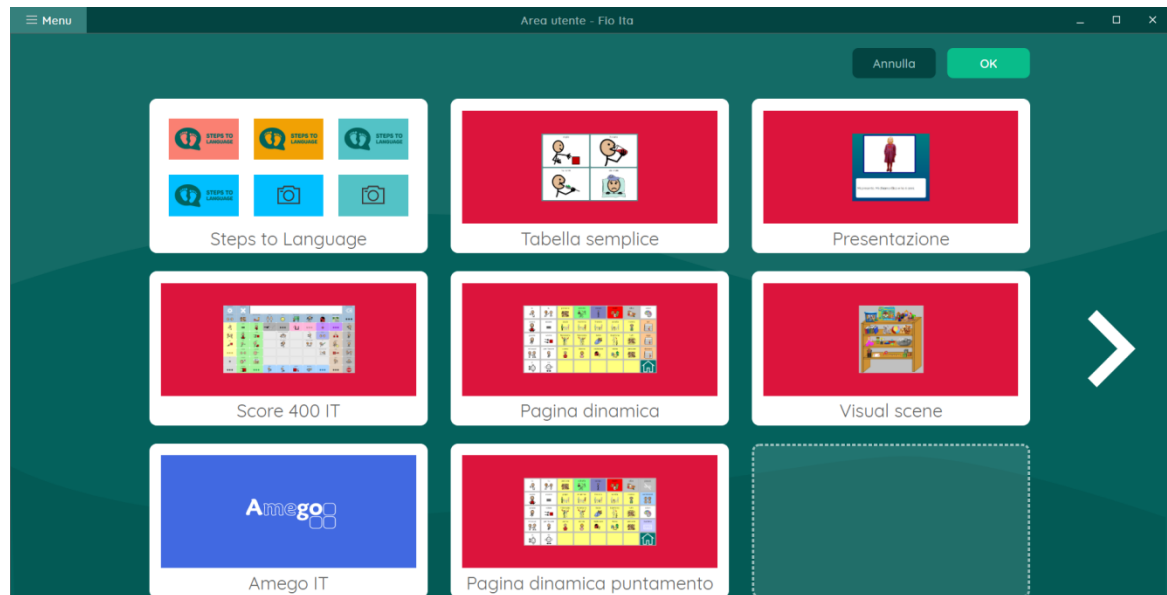

- Trascinare
- Riposizionare sulla stessa pagina o in pagine diverse
- Raggruppare in cartelle

# Creazione guidata

## Creare un nuovo set di pagine

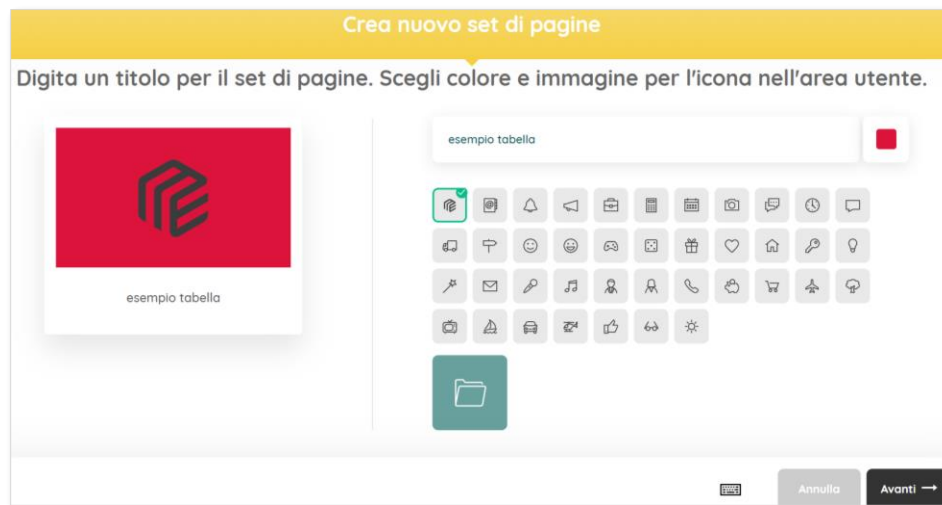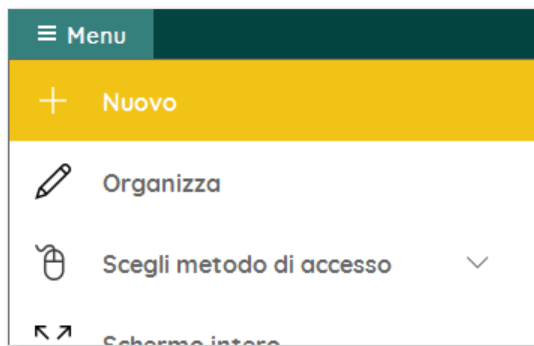

## Composizione guidata



# Creazione guidata

Col Riempimento rapido si aggiungono contenuti con estrema velocità e facilità.

Attivare 'Selezione' e poi fare clic sulle celle.

The image shows a software interface for guided creation. At the top, a header bar contains 'Pagina 1'. Below it, a grid of cells is visible. A central dialog box titled 'Riempimento rapido' is open, containing a list of words: cane, gatto, cavallo, asino, mucca, pecora, capra, agnello, gallina, gallo, pulcino. Below the list, it says '11 di 30'. At the bottom of the dialog are 'Annulla' and 'OK' buttons. To the right, a sidebar contains various settings: Immagine, Etichetta, Stile (set to 'Stile 1'), Azioni (with 'Aggiungi azione' button), Proprietà, Taglia/Incolla, Celle multiple (with 'Selezione' and 'Selezione tutto' buttons), Riordina, Riempì veloce, and Scansione/Temporizzazione. Red arrows point to the 'Selezione' and 'Riempì veloce' buttons. At the bottom of the interface, there are navigation icons and a green checkmark button.

# Personalizzazione



Menu>Modifica oppure F2

- Menu
- Area utente
- Modifica F2**
- Scegli metodo di accesso
- Schermo intero
- Stampa
- Impostazioni

The screenshot displays a software interface for personalizing a page titled "Gita allo zoo - Pagina 1". The interface features a grid of animal icons with labels: leone, tigre, elefante, zebra, scimmia, koala, Panda, ippopotamo, giraffa, rinocerante, gorilla, orso, pinguino, fenicottero, arone, and pappagalio. A red box highlights the "Modifica" menu item in the left sidebar and the "area modifica" (edit area) on the right side of the interface. The "area modifica" panel includes options for "Immagine" (Image), "Etichetta" (Label), "Stile" (Style), and "Azioni" (Actions). The "Immagine" field is set to "zebra", the "Etichetta" field is set to "zebra", and the "Stile" field is set to "Stile 3". The "Azioni" field is set to "zebra". The "area modifica" panel also includes a "Proprietà" (Properties) section with "Taglia/Incolla" (Cut/Paste), "Celle multiple" (Multiple cells), and "Scansione/Temporizzazione" (Scanning/Timing) options. The "area modifica" panel is highlighted with a red border.

# Personalizzazione

Personalizzare stili, immagini, etichette e programmare azioni

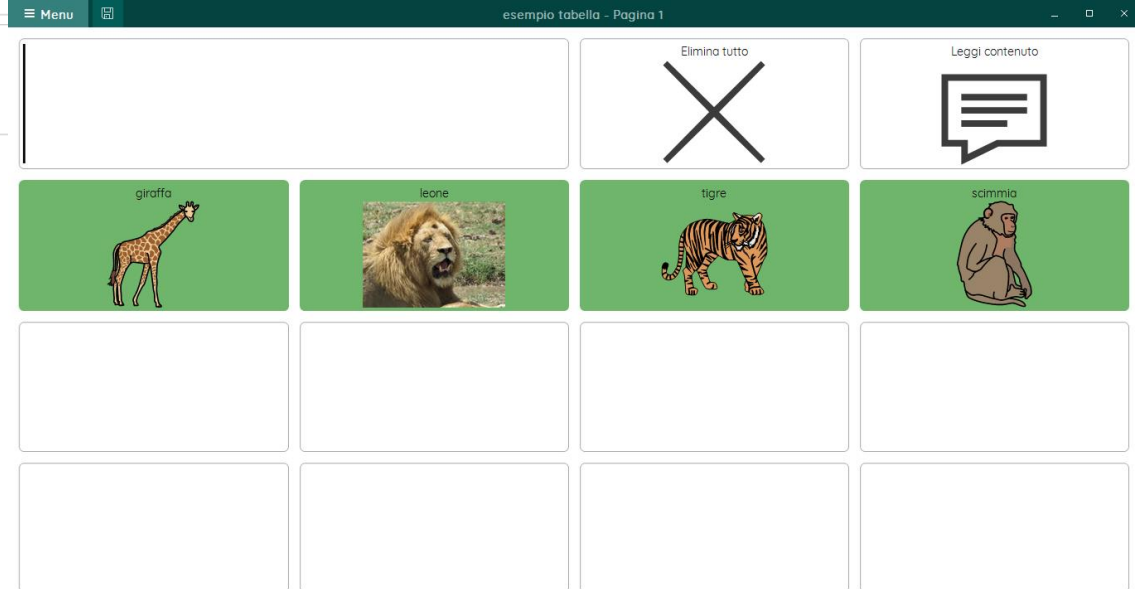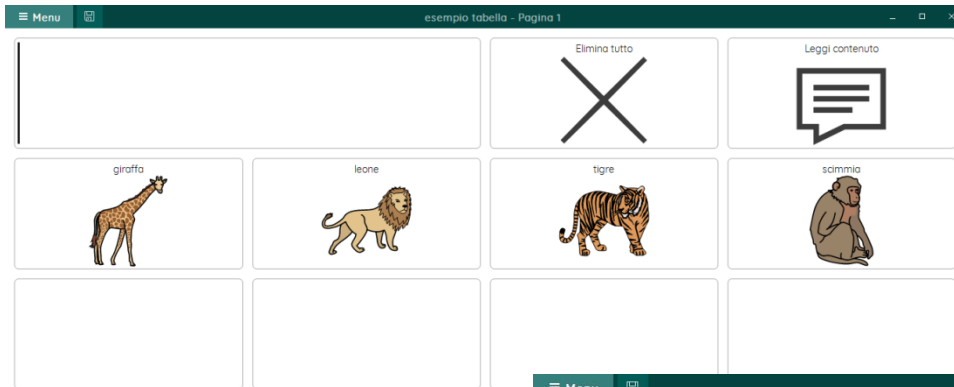

# Backup in cloud e accesso remoto

← Indietro

Il mio profilo utente

Impostazioni del profilo utente

Impostazioni del cloud

## Impostazioni del cloud

serve un account Google  
i dati vengono salvati in Drive

.....@gmail.com indirizzo email dell'utente

Disconnetti

Crea un nuovo backup

Informazioni sul backup

Data ultimo backup: 11/12/2020, 8:12:26 AM

Backup automatico i  No

### Modifiche in remoto

Per consentire a un'altra persona di accedere alla propria area utente, è necessario indicare nello spazio sottostante i dati del Google Drive della persona. Questo autorizza la persona ad accedere all'area utente.

.....@gmail.com

indirizzo email dell'operatore autorizzato ad accedere

+

⌨️ OK



# Video su YouTube



Promo



Promo + vari tutorial

# Grazie della partecipazione!



[mfquinn@srt.com](mailto:mfquinn@srt.com)

# Rivenditore in Italia



Per ulteriori informazioni, contattare  
[www.leonardoausili.com](http://www.leonardoausili.com)

## Leonardo Ausilionline srl

via Nobel, 88

42124 Reggio Emilia - ITALIA

tel. 0522/923770    0522/272369    051/0516600 (Bologna)

cell. 3408685900    fax 0522/272586

e-mail: [staff@leonardoausili.com](mailto:staff@leonardoausili.com)

[Link alla pagina di Mind Express](#)